

甘露醇恒温仪

产品名称	甘露醇恒温仪
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

甘露醇恒温仪用途：甘露醇天气冷了容易结晶，甘露醇贮藏时低于 15℃，即有10%析出结晶，贮藏于20℃以上环境中才不会形成结晶。一旦结晶，温度达不到60℃，是无法溶解的，所以即使到了夏天，已经结晶的甘露醇也不会主动溶解，因为一般药房及各科室甘露醇都是室温（0℃-30℃）保存。如出现结晶，常用

甘露醇恒温仪使用说明：

1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等*溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇恒温仪参数：

产品名称:FYL-YS-150L

产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220

产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220

额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48	额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48	额定频率:50Hz额定输入功率:160W箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48
产品型号:FYL-YS-151L 额定电压:AC220V 额定输入功率:120W 噪音(声功计):42dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*565*860mm 内部尺寸(W*D*H):504*487*634mm 有效容积:150L 净重:64kg 温度范围:0-100	产品型号:FYL-YS-281L 额定电压:AC220V 额定输入功率:160W 噪音(声功计):46dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*565*1440mm 内部尺寸(W*D*H):504*487*1215mm 有效容积:280L 净重:99kg 温度范围:0-100	产品型号:FYL-YS-431L 额定电压:AC220V 额定输入功率:200W 噪音(声功计):48dB(A) 箱体尺寸(W*D*H):595*675*1795mm 内部尺寸(W*D*H):504*598*1570mm 有效容积:430L 净重:129kg 温度范围:0-100

甘露醇恒温仪产品特点：

- 1、 温差范围：±2
- 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您售后！

甘露醇恒温仪说明：1)水和电解质紊乱优良为常见。快速大量静注甘露醇可引起体内甘露醇积聚，血容量迅速大量增多（尤其是急、慢性肾功能衰竭时），导致心力衰竭（尤其有心功能损害时），稀释性低钠血症，偶可致高钾血症；不适当的过度利尿导致血容量减少，加重少尿；

大量细胞内液转移细胞外可致组织脱水，并可引起神经系统症状。（2）寒战、发热。

（3）排尿困难。（4）血栓性静脉炎。（6）甘露醇外渗可致组织水肿、皮肤坏死。

（6）过敏引起皮疹、荨麻疹、呼吸困难、过敏性休克。（7）头晕、视力模糊。（8）高渗引起口渴。

（9）渗透性肾病(或称甘露醇肾病>，主要见于大剂量快速静脉滴注时。其机理尚未*阐明，可能与甘露醇引起肾小管液渗透压上升过高，导致肾小管上皮细胞损伤。病理表现为肾小管上皮细胞肿胀，空泡形成。临床上出现尿量减少，甚急性肾功能衰竭。渗透性肾病常见于老年肾血流量减少及低钠、脱水患者

。