

热销血液溶浆机

产品名称	热销血液溶浆机
公司名称	常州迈科诺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市金坛区尧塘镇林丰村委宜干桥188号
联系电话	0519-82539655 15366816908

产品详情

热销血液溶浆机

血液溶浆机<http://www.maikenuo.com>

常州迈科诺仪器有限公司感谢您对我们的血液溶浆机感兴趣，如果想了解更多血液溶浆机等产品的详细信息请登录我们的网站：<http://www.maikenuo.com>。

血液溶浆机主要技术参数及特点：

- 1：温控：37 ± 1
- 2：温控精度：± 0.5
- 3：数码显示温度，微电脑控温。
- 4：加热功率： 1000w
- 5：解冻时间： 10min
- 6: 最大化浆量(100-200ml) x8袋 或500ml x4袋
- 7: 有不可移动不锈钢解冻蓝4只
- 8：设有自动双臂往返摇摆系统80次/分钟 恒速控制。

血液溶浆机功能作用：

血液溶浆机是针对医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于± 0.5 ，配套安装了自动摇摆系统，也可根据实验要求

自动调控频率，特别是融化血浆，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者，是血库理想的配套工具。

血液溶浆机使用方法：

- 1.平时设定水温，可长期开机，用时将摆幅开关打开，设定频率，自动摇摆，用完关掉摇摆开关，节约用电，减少机械磨损。
- 2.多功能血液溶浆机使用前一定要将水加到水位线，切勿干烧，以保护加热管。随着开机时间的不断增长，水箱的水会逐渐蒸发，请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。
- 3.设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 或 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，开始加热指示灯亮。
- 4.多功能血液溶浆机提前设置：按set键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为即停止的提前量，提前量参数要慎重调整，为减少温度过冲，仪表控制加热输出时会提前截止加热，当温度下跌到提前量以下时又开始加热，在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的，这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例：若设定值为50.0，提前量为0.5，仪表控制加热到49.5.0时继电器释放，温度下跌到50.0 -0.5 =49.5 时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少，提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按set键3秒仪表回到工作状态。（注意：提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的，一般情况下不需要修改）。
- 5.多功能血液溶浆机误差的修正：在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按set键3秒进入仪表深层菜单，第一个出现并闪动的参数为e00即提前量，再按一次set键出现闪动的参数即误差修正参数，配合 或 键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9 到+9.9，修正完后再按一下set键退出。仪表出厂时修正值为0.0。

相关推荐：

恒温电热板<http://www.maikenuo.com>

全温振荡器<http://www.maikenuo.com>