

高级成人护理及CPR训练模拟人

产品名称	高级成人护理及CPR训练模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH/3000
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

产品详情

产品名称：高级成人护理及cpr训练模拟人、成人护理训练模拟人 型号：zh/3000

产品介绍:

zh/3000型高级成人护理及cpr模拟人是集护理与急救于一体的整体护理人，身高约170cm，双眼可眨动。关节灵活，可实现多种体位，满足不同的操作需要。解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，胸皮可打开，能观察到真实大小的肋骨、双肺、心脏、肝脏、胃等器官。

颈动脉搏动：手捏压力气囊打气时，可以触摸到明显的颈动脉搏动。

功能特点：

心肺复苏功能：

- 此款产品的电子监测仪设置了训练程序，当开关开至训练状态，此时程序按照吹气与按压比为2：30自动运行，当开关开至重新设置状态，可在吹气与按压之间通过开关任意切换。
- 液晶电子监测系统：可监测吹气量、按压位置以及按压深度；

口对口人工呼吸：模拟人头可后仰，保持呼吸道畅通，人工呼吸时胸廓有起伏，当吹气量为500-600ml时绿色指示灯会亮，当吹气量少于500-600ml时黄色指示灯会亮，当吹气量大于500-600ml时红色指示灯会亮。

心脏按压：按压部位为胸部胸骨下切迹上两指胸骨正中部位或胸部正中乳头连线水平处,两只手掌根重叠,垂直用力按压力度使胸骨下降4-5cm绿色指示灯会亮，当小于4-5cm时黄色指示灯会亮，当大于4-5cm时红色指示灯会亮。

床上擦浴及更衣。

扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法。

轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。

瞳孔观察示教：散大的瞳孔（右眼），正常的瞳孔（左眼）。

外耳道的冲洗。

氧气吸入法、雾化吸入疗法。

鼻饲术：

- 托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲；
- 胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液；
- 真实大小的胃，可容纳350ml的液体；
- 透明胃，可观察到胃管进入胃部的动态过程；

洗胃：可进行洗胃练习，经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法；

肌肉注射：

- 左上臂、臀部、大腿股外侧部有肌肉注射块；
- 可注入真实药液；
- 肌肉注射块可取下清洗，更换方便；

右手臂静脉注射：

- 正确穿刺时落空感明显并有回血产生；
- 同一部位可经受反复穿刺且不易渗漏；
- 静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用；

造瘘口护理：胃造瘘口、膀胱造瘘口、结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习；

男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗：

- 模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑；
- 男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18-20cm）；
- 女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3-5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等；
- 导尿术成功后可导出模拟尿液；

可实现灌肠练习操作；

可选配安装功能：

血压测量手臂

相关产品:

全功能护理人模型(带血压测量)

护理模拟人高级全功能组合式训练模型

高级全功能组合护理训练模拟人

高级组合式护理人(男女互换任选)

新型多功能护理人模型

婴儿护理人模型

高级创伤护理人模型

高级新型基础护理实习操作模型

基础护理模型(新型实习操作)

友情提示：您只要致电：021-64049756 021-64049758 021-64049751
我们可以帮您推荐符合您要求的高级成人护理及cpr模型人zh/3000相关产品。