

华康人体健康导航仪

产品名称	华康人体健康导航仪
公司名称	广州市华康电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区荷景南路17号A栋3楼
联系电话	020-62752440 15097390980

产品详情

华康人体健康导航仪

- 1、适用范围电源: a.c.220v/50hz
- 2、电源功率: 30va
- 3、激光功率: 3-5mw
- 4、活氧量: 400mg/h
- 5、生物波输出: 30—100 v p - p f =khz—3khz
- 6、超声波频率: 1mhz
- 7、使用环境温度: -10 - 40
- 8.产品尺寸 :
- 9.产品重量 :
- 10 . 外包装尺寸
- 11.整机重量

配件图样如下：产品特点：华康公司生产厂家2013

年新款治疗仪隆重上市，电脑操控，功能齐全，超大屏显示，疗效独特，调频，激光，超声波美容，新增活氧功能！遥控，3路电脉冲，2路热疗，9

路输出。适用：关节炎，颈椎病，腰肌劳损，高血压老年性常见病。新增家庭生活消毒！空气净化！以体销，会销，

直销，体验店，药店等模式

销售。可贴牌，经销，代理，加工生产。网址：www.hkzly.com,招商热线：02081507866李

小姐（愿华康为您带来最大的财富！）

相关配件推荐使用方法图：注：（除基本配件之外的配件需另行购买。部分机器因功能不同，激光线、心率线、超声波除外，其它配件均属各型号通用。）(1)

使用前准备：将各种配件与机器连接好，电源插头接插在220v 市电插座上。

(2) 操作指南： a. 用于杀菌消炎用途：将活氧插头轻轻插入女性阴道口，将导气管与机器左边的杀菌输出口对接，开启“杀菌”按钮，活氧顺气管贯入女性阴道，杀灭各种病毒细菌。 b. 用于健胸用途：将胸罩电极涂上丰乳丹或营养精华素；两针线将胸罩与机器连接；开启机器开关键，将定时键设定使用时间，可设定；10分、20分、30分，按强度“+”使输出强度到合适位置。 c. 用于美容用途：将润肤霜等液体涂于皮肤上，加适当清水，开启超声波美容按键，将超声波头在美容部位皮肤上来回移动护理，使其“导入”皮层。 d. 用于保健理疗用途：将粘胶片电极粘贴在酸痛部位，开启“按摩”按键，理疗部位有按揉、推拿、针灸等振动刺激感觉，达到理疗目的。 e. 妇女阴道理疗：将女性专用理疗头加少量凡士林作润滑剂(药店有售)接插入女性阴道，开启“按摩”按键，女性阴道

内有各种跳动、振动、推揉感觉，刺激女性阴部神经收缩，促进荷尔蒙分泌，提高性兴趣。 f. 用于减肥用途：将减肥膏等液体涂于减肥部位上，加少许水份，使超声波头贴紧皮肤来回游动刺激皮肤神经，使毛孔扩张，燃烧脂肪，加速血液流动，达到减肥美腿的目的。 g. 用于激光治疗用途：将激光治疗头照准鼻腔或手腕穴位，开启激光按键，650nm单束红光照射血管，使聚集成团的红细胞分散，降低血液中血栓形成物的含量，清洗血管，治疗和预防心脑血管疾病。 **注意事项**

禁止使用范围： (1) 严重的高血压、心脏病患者； (2) 使用人工心脏起搏器，人工心脏仪，心律调整器者； (3) 月经期妊娠期妇女； (4) 恶性肿瘤及甲状腺亢进患者。