

贝德固牙齿脱敏剂

产品名称	贝德固牙齿脱敏剂
公司名称	广州贝奥吉因生物科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:贝德固
公司地址	黄埔区瑞泰路2号C栋2层
联系电话	18027120927

产品详情

牙本质过敏：

牙齿表面的牙釉质磨损或牙龈萎缩引起牙本质外露，使原本封闭的牙本质小管打开，受到冷热酸甜等刺激可直达牙神经，引起短暂而尖锐的疼痛。

产品规格：

A型1.2g ;B型3g

适用范围：

用于缓解因牙本质暴露而引起的牙齿过敏症状。

产品作用：

- 1、矿化修复牙表面，高效封堵牙小管：持续释放氟离子渗透到牙釉质表面形成氟磷酸钙，促进釉质再矿化，沉积封闭牙本质小管，降低牙本质过敏酸痛。
- 2、降低敏感度：钾离子经牙本质小管渗入牙髓，降低牙髓神经敏感性。
- 3、适合长期放心使用：连续使用，还可使牙本质小管中钾离子达动态平衡，效果更佳，持续有效。

特性优势：

- 1、钾离子经牙本质小管渗入牙髓，阻断或抑制牙髓神经被激发，即刻缓解疼痛。
- 2、氟离子协同脱敏，长期诱导釉质矿化修复封堵牙本质小管，治标更治本。
- 3、操作便捷，直接注射涂抹，避免交叉感染，更安全。

- 4、高分子凝胶剂，有效成分持久、稳定释放。
- 5、抑制口腔细菌，减少牙菌斑，维持口腔健康。

使用方法：

- 1、使用本品前，请先清洁口腔。
- 2、取下针管的封帽，将脱敏剂均匀注入敏感部位牙齿对应的牙托内，使用量根据牙齿敏感程度添加，单次用量1-1.5g。
- 3、将涂匀凝胶轻轻按压，使牙托与牙齿完全匹配，用棉签将溢出的凝胶擦净。
- 4、每日使用一次，建议使用时间15-60min。
- 5、使用后请立即刷牙，用清水漱口，将牙齿表面残留的凝胶洗净，冷水冲洗牙托，擦干后放入牙托盒内备用。