

# 批发深圳CK-101家用电子血压计价格

产品名称	批发深圳CK-101家用电子血压计价格
公司名称	深圳市吉富源科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	品牌:吉富源 型号:CK-101
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇塘下涌智芯茂科技园
联系电话	0755-88217265 18025339017

## 产品详情

家用电子血压计

产品功能特点

- \*智慧型全自动加压及减压
- \*可同时测量收缩压、舒张压及脉搏
- \*操作简单，只需按开关按钮即可进行测试
- \*储存60组测量值记忆
- \*可查阅单笔或全部测量值
- \*3分钟自动断电省电装置
- \*智能侦错装置、自动侦测电力
- \*本机适合测试范围：手腕周长为135~195mm
- \*大型数字液晶显示萤幕
- \*高准确度

家用电子血压计使用方法

## 安装或更换电池

### 1、安装电池：

依电池盖箭头方向开启电池盖，依内部标示（+）、（-）电池符号，装入2颗aaa碱性电池，再将电池盖滑入关好。

### 2、更换电池：

机器会自动侦测电力，将显示幕出现缺电符号时，表示电力不足，重新确认电池极性，或即刻更换2颗全新aaa碱性电池，否则将无法测量血压及脉搏，且血压计内储存的测量值及时间设定也会遗失。

## 手腕带的使用方法

1、手心向上，血压计正面也向上，并将手腕带裹于离左手腕关节5~10mm处（约一小指宽）。

2、抓住手腕带末端下面的部分，并在拉动的同时，将其卷绑在手腕上，往上拉紧粘住裹上，腕带与手腕间勿留空隙。

3、手腕带过长的部分，可以适当地反折固定。

## 正确量测姿势

以坐姿进行测量时，可将左手放在桌上，或依实际需求加垫血压计收纳盒或枕头，来调整血压计手腕带位置。加垫的物品不能压住手腕带，以免影响量测数值。

## 如何量测血压

为了解您的血压，请每天固定时间测量血压。测量前请参考“测量前建议”、“手腕带的使用方法”、“正确量测姿势”等内容。

1、将手腕带绑在手腕上，将手心向上放松，使手腕带的位置与心脏同高。

2、按开关键开启电源。显示幕所有的符号会出现一下，当萤幕上数字0停止闪烁时，即可开始量测。

3、再按一下开关键开始进行量测，手腕带内空气到180mmhg左右血压值，在充气时萤幕会出现充气符号（量测中请勿摇手或说话）。

4、加压完成后，压力会逐渐减少，测得脉搏后，心型符号会开始闪烁与心跳同步

。（注意：若血压可能偏高时，血压计可能停止泄气，且帮浦会再自动加压至理想压力值）。如何查阅测量值

#### 1、自动储存测量值

每次测量完成时，机器会自动储存所测得之收缩压、舒张压及脉搏数，最多可储存的旧测量值将被自动删除，代之以最新的测量值。

#### 2、读取单笔测量值：

在一般状态下，按记忆键读取最新测量值（收缩压、舒张压及脉搏数）、再按一下记忆键可读取下一组资料，重复按记忆键依序读取储存的资料。（m01表示最新一次测量值，m02表示倒数第二次之测量值，以此类推）。

#### 注意事项

- 1、请确实将血压计电池关闭后，再进行更换电池。若未先将血压计电源关闭而直接更换电池，或超过30秒没有安装电池时，机器内储存的所有测量值将会遗失。
- 2、请将手腕带卷绑在裸露的手腕上，不要将衣服袖子卷在手腕带上。
- 3、请不要太用力拉扯手腕带使之卷绑过紧，如不能将手腕带正确绑好，将无法测得正确之血压。若不有独立操作者，应寻求他人帮助以便正确使用。
- 4、为确实测得正确血压值，请确定手腕带的位置和心脏保持同一水平高度，手心向上放松不能用力，在做完五~六次深呼吸后进行测量，即可测得正确数值。手腕带位置一定要与心脏保持同一水平高度，太低或太高都会产生量测误差。如果手腕带过低，或者绑太紧，测量的血压值可能偏高。
- 5、若腕带一直处于充气状态无法停止，请立刻将手腕带解开、或按开关键将机器关闭。请勿因为暂时的高数值或低数值而紧张，请每天在固定时刻测量和记录血压，并向专业医生咨询。

厂家直销家用电子血压计