

供应多功能翻身护理床YHC06

产品名称	供应多功能翻身护理床YHC06
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	2260.00/张
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

yhc06瘫痪护理床床体架构与c05电动护理床来自于同一平台，护理床在结实耐用、易于操作、功能齐全的基础上不丢失舒适性，手动操作装置大大降低了成本，让您花手动床的价格买到电动护理床的品质。

多功能翻身护理床—yhc06是最新推出的新型翻身护理床。

该床最大的卖点：

- 1.下腿方式为全下腿，方便配置气床垫。
- 2.起背有滑轮，减少摩擦，轻巧省力。

床面采用方钢床面焊接成型，透气性好，结实耐用，外形美观，更具舒适感。床头床尾采用进口高级工程塑料吹塑而成，结实耐用、抗酸碱、抗氧化、防腐蚀、易清洁。该床具备基本的上起身、上/下曲腿（全下腿）、坐便等功能外，采用优质的高强度铝合金折叠护栏，并更具实际护理需要，左右翻身功能更能有效地防止长期卧床患者褥疮的发生，整张护理床在性能特点方面更加人性化，床骨架钢材用料更厚实，做工更结实，为贴近实际需要，本款床还配套半棕半海绵的功能型床垫（床套可拆洗）

产品性能分析：

yhc06高档病人翻身床可以说是c05高档电动护理床的手摇版，yhcc06高档病人翻身床同时具备c05电动护理床的品质，大众护理床的价格，是一款具有高品质、高性能和较强实用性的多功能护理床。

此款翻身床采用abs工程塑料一次性成型床头、床尾，可以配合其他家具使用，色调和谐美观，完全区别于其它护理床的颜色和款式，使用者不会有心理压抑的感觉，不会产生心理障碍。翻身床背角度在0-75度之间自由调节，足腿部在0-90度之间自由调节。使用者可以根据需要自己调整到最佳位置，不管是看电视、看书还是学习都能做到轻松自如；随时调整姿势，有效减轻疲劳，防止褥疮生成。一方面降低了家属和护理人员的劳动强度，另一方面增强了使用者的自理能力，消除了长期卧床和瘫痪病人害怕给家人增加负担的隐痛，给使用者继续生活下去的希望。 yhc06高档病人翻身床的设计周到而细致，配备了活动餐板，手部能动的使用者可以在床上看书、写字、用餐等。配有输液架方便病人在家中打吊瓶。可拆卸床头、床尾，可方便为病人洗头、洗脚、按摩和整理床铺等。四个万向静音脚轮，不但方便室内打扫卫生，还可以随时轻松的移动到阳光充足或通风良好的空间；静音脚轮刹车装置轻松固定床身。 yhc06高档病人翻身床安全防护措施得当，护栏采用一键收起式设计，病人在床上时打开，防止病人滑落。收拾床时可把护栏收起，方便整理清洁床面。床头床尾采用双保险挂钩设计，护理过程中防止脱落。

产品描述：1、床架：采用优质型钢焊接成型，表面经过酸洗、磷化后静电喷塑，牢固耐用，美观大方

- 2、床板：采用优质冷轧钢板冲压焊接成型，表面经酸洗、磷化后静电喷塑，防腐蚀、易清洁。
- 3、床头、床尾：采用优质工程塑料一次成型，外形美观，颜色柔和。并采用锁扣式安装，可以轻松拆卸，四角配置防撞圆弧设计。
- 4、万向静音脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮，锁定稳固，便于移动和室内清洁。
- 5、起背功能:通过摇动起背摇杆可以在0-75度范围内背部升起，方便病人生活起居。
- 6、曲腿功能：可以在病人坐起时小腿下弯曲，符合人体工学原理。
- 7、便功能:床体中央设置有便孔，方便病人卧床大小便。（推拉式便盆）
- 8、床上洗头功能：配置嵌入式塑料洗头盆，方便床上洗头。（建议床板摇起15度左右后使用）
- 9、床上洗脚、泡脚功能：

1、护理床使用的管材：我们的管材都是加厚的国标号，床帮尺寸是4cm*8cm，管材厚度是1.4mm，床面管材厚度是 1.2mm，承重不限，同行业达到这个标注的不多；

2、护理床的焊接工艺：通过加热，加压两者并用，大大降低焊缝中的含碳量，防止裂缝产生，我们的床体体质可保五年，有的厂家采用的是只加热焊接，它的缺陷是焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹，恶化焊缝的质量和性能；

3、床体静电喷塑工艺：先涂油、酸洗、表调、碳化，最后才是喷塑烘干，喷塑的效果有耐180度高温的特点，附着力好，表面光滑平整，耐腐蚀，是当前最先进最环保的金属表面处理工艺。

4、护理床摇柄：我们的护理床所安装的摇杠，都具有负载保护装置，这样的摇杠承重力量大，使用寿命长。所谓床，生产不出什么特别的样子，所以看上去都差不多的，但是请相信“细节决定质量”而决定您选择的只能是质量！也就是细节！

翻身护理床比普通病床的优势：

(1) 勤翻身：实施有效到位的翻身来间歇性地解除局部压迫，是预防褥疮最为有效、关键的措施。一般卧床病人每1—2小时翻身一次发现皮肤变红，则应每小时翻身一次，左、右侧卧、平卧、俯卧位交替进行。

(2) 勤换位：病人要经常不断地变化体位并且要拍背，可以对患者进行仰卧，侧卧，半坐位，端坐位，俯卧位，头低脚高位，头高脚底位，膝胸卧位等，不同的体位有不同的作用，能够让患者更健康；

(3) 在护理上，实施按摩，擦洗，刚换床单，洗头，洗脚，起坐，大小便，有效地防止了拖，拉，拽，以防损坏皮肤；

背部折起角度为： $0 \sim 75^{\circ} \pm 5^{\circ}$

腿部下折角度： $0 \sim 85^{\circ} \pm 5^{\circ}$

翻身角度： $0 \sim 45^{\circ} \pm 5^{\circ}$

规格 2000*900*580mm(长*宽*高)

护理床安装说明：

1、因为运输方面的原因，我们不可能把床全部安装好后发到客户的手中。所以需要买家自己安装。2、安装很简单，主要的机械传动部分我们在出厂时已经安装、调试完毕。需要客户回家自己安装床架螺丝，螺丝已经配在床体上了。3、床头是双锁扣插接式的，自带防脱扣片。4、万向静音脚轮是需要安装在床腿上的，安装前先把刹车锁片按下后再安装。以免随着旋转安装不进去。

【保修】：自购买之日起保修1年，保修期外终身厂价供应零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海地区免费送货安装货到付款

订购热线：021-67644371 13482039409 13816059002

上海市松江区新桥镇场西路285弄93号

更多产品请登录上海<http://www.shakzj.com>