

# 供应电动颈椎牵引椅E08

产品名称	供应电动颈椎牵引椅E08
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	2300.00/张
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

## 产品详情

kfy-i型为点动牵引，患者坐在椅子上，按"急退"键，让牵引带充分复位，套上牵引带，通过调节颈牵装置顶部调节杆的长短，来调整颈牵所需的角度;按住"牵引"键，能增加牵引力，当达到要求的牵引力时，松手即保持，牵引时间完成时，按"急退"键，解除牵引力。牵引结束后，解下牵引带，原位休息一下即可。 kfy- b型: (1) 牵引程序设定完毕后，让患者坐在椅子上，手握控制器，拉下牵引带套在颈部。各程序设定时患者手持急退键灯应处于熄灭状态。  
(2) 电热垫的操作，如果进行热疗，将牵引带套好后，再将加热带围在脖子上。  
(3) 按"热疗开关"键一次。  
(4) 如需调整温度，按"+"或"-"键，可在20-60 ° c范围内任意设定加热温度。  
(5) 不需加热时，再按"热疗开关"键一次，即停止加热。(6) 按"牵引"键，牵引椅可进行自动化工作;在牵引总时间窗口，设定的总时间与剩余时间会交替出现，以便操作人员了解还能牵引多长时间。  
(7) 时间到达设定的总时间时，牵引椅发出提示声音，并自动复位。(8) 牵引结束后，解下加热带和牵引带，让患者原位休息一下即可。 kfy-i型电机动力，电动操作，持续牵引

技术参数 电源；220v/50hz 功率<50va 牵引行程；0-300mm 牵引力；0-300n

安装：一、打开包装箱，将牵引椅放到平坦的地面上。二、将牵引立杆拧在椅架的镙纹孔内，再套上牵引横杆，调整好横杆的方向，拧紧旋钮、挂好牵引带支架、牵引带。三、kfy-i型安装变压电源，并按标志相应插上电机和手柄接头。四、将地线连线可靠接地  
五、将“急退”控制器和电热带插口，按标签指示接好。1、kfy-i型不需设置。2、kfy-itb型(液晶屏显示款)牵引椅牵引程序设置 一、打开电源。插上电源插头，按下“电源开关”接通电源。  
二、自动牵引参数设置。以下对各个参数的设置，是通过依次按“设定”键来进行切换的。1、按“设定”键一次，牵引力窗口发白，设置牵引力。此时按数字键输入数字，第一个数是百位，第二个数是十位，个位恒为0不可设。单位牛顿。2、再按一次"设定"键:总时间窗口数字发白，设置牵引总时间。此时按数字键0-9，可在0~60分钟内设定参数值。3、再按一次"设定"键:牵引时间窗口数字发白，设置牵

引时间。此时按数字键1-9，可设定间歇牵引时每次牵引的时间参数值，取值范围1-9分钟。4、“设定”键再按一次：间歇时间窗口数字发白，设置间歇时间。此时按数字键0-9，可设定间歇牵引时每次间歇的时间参数值，最长为99秒。5、再次按下“设定”间歇窗口显示“p9”字样，牵引力窗口显示牵引模式，闪动的数字是它的序号，可以通过数字键来选择预设的八种牵引模式。6、设置完成。再按“设定”键3秒：退出设定状态，屏幕上无数字发白，显示的内容是刚设定好的牵引数值。按“牵引”键即能牵引。

需要注意的是：1、牵引力、牵引总时间、牵引时间最少不能设定为零(零无实际意义，当输入零时，机器会有提示音)2、在设定时，如果输入错误数据，可在本窗口(数字闪动的窗口)重新输入正确的数据。3、按“退格”键，可将光标退回上一个窗口。4、颈椎牵引时牵引力可依据患者的自身体重的10%~15%进行设定，牵引角度以10~30度为适宜。首次牵引时牵引力度应适当减小，视患者情况缓慢增加。保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>