

家用颈椎牵引椅B04

产品名称	家用颈椎牵引椅B04
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	360.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

使用方法：

- 1、使用前应确认各部位连接是否牢固、转动灵活。
- 2、使用时配合颈椎牵引带，挂在牵引计数器上，转动手轮。牵引力大小以使用者感觉适宜为好。
- 3、牵引结束、扳动制动抓即可解除牵引。
- 4、牵引时间一般每次30—50分钟、每天两次。10—15天为一疗程，或遵医嘱。

注意事项：

- 1、使用前请仔细检查安装连接是否牢固，以免伤及患者。
- 2、重症患者与高龄患者应在专人陪护协助下牵引。 3、如患有其它疾病是否适合牵引治疗请遵医嘱

结构特点：1、椅子骨架用高频中臂焊管焊接成型白色烤漆。

- 2、椅子靠背立体与椅坐面椅与前腿用螺栓连接，可以拆开。方便运输。
- 3、牵引杠用优质电镀管做成与下部分为两体。 4、可达到牵引所需力量。
- 5、钢丝牵引绳通过处均有滑轮，方便灵活。

1：b04颈椎牵引椅，是采用手动机械传动实行牵引的一种新型牵引椅。适用于颈椎病的牵引，外观小巧、灵便。牵引力：200n 牵引行程：310mm 外型尺寸：450x500x1900（全高）370（坐面高）

- 2、椅子骨架用高频中臂焊管焊接成型白色烤漆。

3、椅子靠背立体与椅坐面椅与前腿用螺栓连接，可以拆开。方便运输。

4、牵引杠用优质电镀管做成与下部分为两体。

5、可达到牵引所需力量。

6、钢丝牵引绳通过处均有滑轮，方便灵活。

7、使用前应确认各部位连接是否牢固、转动灵活。使用时配合颈椎牵引带，挂在牵引计数器上，转动手轮。牵引力大小以使用者感觉适宜为好。牵引结束、扳动制动抓即可解除牵引。牵引时间一般每次30—50分钟、每天两次。10—15天为一疗程，或遵医嘱

【保修】：自购买之日起免费保修1年（非人为损坏）

【保修】：自购买之日起保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>保修1年，终身厂价供应零配件。该颈椎牵引椅为手控式，牵引和牵引力,采用直线拉力 计量器控制。该椅外形美观、设计合理、结构牢固安全、操作方便,是治疗颈椎病颈肩牵引,腰背保健,清除疲劳,松弛筋骨祛酸除痛,防治骨刺,矫正体态,美化线条的理想产品。

主要技术指标：

牵引力：200n

牵引行程：310mm

外型尺寸：450x500x1900（全高）370（坐面高）

保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>