

供应防褥疮波动气垫尔玛SYD-PB型双机芯

产品名称	供应防褥疮波动气垫尔玛SYD-PB型双机芯
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	1380.00/张
规格参数	
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

本产品“尔玛”牌syd-pb型电动泵医用喷气气垫是专为长期卧床病人作预防褥疮用。降低护理人员劳动强度而

??

“??”syd-pb????????????????22????????????????????????????????

??

??????

1 ????????????????????

2? ???????????10l/min?

??????????3l/min?

3 ???????40db(a); ?????????????????????????????????

4 ??????6?/h±?/h

5 ???

6 ??????????2??

7 ???

1 ??????

??

??????????????

??

2 ???

???

3 ???

超低噪音结构，超强度尼龙面料。日本，德国泵芯技术yd-pb型医用喷气气垫，特别适合于长期卧床病人预防褥疮,其特点是：噪音低（35分贝），使用寿命长，为预防减缓褥疮而辅助使用的医疗护理床垫，广泛应用于瘫痪、昏迷、重大手术后、骨折牵引、严重烧伤、冻伤等患者，以及各种重症和终末期患者，适用于医院、敬老院及家庭病床使用。

主要功能：

	尔玛syd-pb型	双机芯医用气垫床防褥疮
电动泵防褥疮垫,舒适低耗具备国际最领先的各种褥疮垫功能、	激光高密度透孔、	自燃气、
动力气巧妙融合强劲有力交替、	使用寿命长、	低耗、
环保、超静音、最适合长期高摇床、气垫不易损坏、不怕折弯、电子自动调控。		

尔玛褥疮垫的工作原理：

自动程控电动装置，可以全自动、全天候工作，通过两根导气管与22个独立的管状气垫相连接，使气垫分为两组交替轻微波动（1, 3, 5。。。。；2, 4, 6。。。。），人体受压迫部位每相隔4~5分钟变换一次，变换患者的体压部位，相当于给病人每小时翻身10余次，每天翻身300次左右。高频率的翻动起到周身按摩，促进血液循环、松弛肌肉的作用。同时轻微波动产生了间隙，使空气自然流通，让皮肤24小时呼吸新鲜空气。气垫表面喷出的微量空气可降低被褥中的潮气和浊气。这样不仅安全，有效地预防了褥疮的发生，而且充分解放人力，完全替代了人工翻身。另外，尔玛褥疮护理气垫不仅能预防褥疮，经大量临床验证，还可以用于治疗褥疮。

主要特点：

- 1、双机芯气泵取消了国内外几十年来一直采用的微电机旋转分配阀配气系统。彻底克服了微电机普遍易坏和转阀磨损而产生的系统泄漏故障；
- 2、两泵芯相隔4-5分钟交替工作，大大降低了泵芯工作强度、泵芯的使用寿命成倍延长；
- 3、波动按摩效果更明显。适合于各类型卧床病人防治褥疮，更适合各种病床和摇床，可以任意变换摇床角度。

气垫的耐用程度大大提高，操作、使用、维护、清洗，更方便省力。

产品说明：

本产品“尔玛”电动泵医用喷气气垫是专为长期卧床病人作预防褥疮用。降低护理人员劳动强度而设计制造的。

如能正确使用产品，将对褥疮的预防起到良好的效果，同时也会延长本产品的使用寿命。

保养常识：

气垫应避免长时间暴露在日光中，以减缓气垫的老化速度。

气垫的清洁应在充气状态进行，可用中性的清洁剂。消毒时，请用75%酒精擦拭，晒干后使用。

每天打扫房间时，请务必关掉气泵电源半小时，以免气泵吸进灰尘。

在移动、保养、维修本产品时应首先切断电源，将电源线插头拔下。

使用一段时间后(一般三个月)应对机壳外部的铜质空气滤清器进行清洗一次，一般用毛刷清洗，必要时可用扳手将铜质滤清器拧下来，用水冲刷干净再拧紧在机壳上。

本产品可适用以下消毒方式：

臭气消毒；

紫外线消毒(时间不宜过长)；

消毒液消毒(清水冲洗后晾干)；

运输和贮存：

贮存条件：温度(-40 ° c)-(55 ° c)；

湿度：10% - 93%；

大气压力：800-1060hpa；

且无腐蚀性气体，通风良好的室内；

运输时，还应注意防潮、防震;搬动时，小心轻放，并按规定向上放置。

产品简介

“尔玛”医用喷气气垫是由22个独立的管状气垫的组成，按间隔的气垫组成二组交替充气，变换患者的体压部位。另外，气垫表面喷出的微量空气可降低被褥中的潮气和浊气。

商品属性

[? ?] ?? [????] 310×170×170mm [? ?] 15va [????] [???? ?]
rt1-20 ???fo.16a 5×20 [??????] 310×170×170mm [??????] 1900×830×90mm [?? ??] 7.5kg
[?? ??] ?? ??? [??????] b? [? ? ?] 860hpa-1060hpa

保修：自购买之日起保修1年，保修期外终身提供零配件。

全国范围内部分地区货到付款。上海部分地区免费送货安装，订购热线：021-67644371

13482039409 13816059002

更多产品请登录<http://www.shakzj.com>