

# 山东东华医疗科技供应外科手术巾 可加碘伏

产品名称	山东东华医疗科技供应外科手术巾 可加碘伏
公司名称	山东东华医疗科技有限公司总公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:贴可舒 型号:30 40 等系类
公司地址	山东淄博高新区天鸿路
联系电话	0533-3914171 15653375653

## 产品详情

贴可舒外科手术膜（医用手术巾、粘连手术巾）产品结构：pu手术薄膜是由医用压敏胶涂布于聚氨酯薄膜，再经特殊工艺制成一款超薄、透湿、透明、适体的手术薄膜，能在手术部位创造一个良好的无菌环境，在无菌外科手术中被广泛应用于手术部位覆盖、手术器械包裹、手术切口保护、手术部位消毒、手术部位包扎污染袋和引流袋，亦可生产产科专用手术膜。）

产品特点：1. 采用本产品可使患者自身、手术操作者和所使用的相关器械相互之间实现隔离，减少交叉感染机会。2. 产品具有优良的粘性，术中绝无脱落，能最大程度的防止术部感染，且术后剥离时不留残胶，节省了清理所需时间。3. 产品款式多样，产品采用易撕边设计或3m样式设计。任意规格或样式可以按照客户需求定制，给临床使用提供更多选择。

产品适应范围：用于护创和手术时覆盖皮肤表面，适用于骨科、开胸、心外科手术、整形、脑科、眼科、妇科等。

使用说明：1.

按临床需要，选择适用规格，待皮肤上消毒液干后，撕开包装袋取出手术薄膜，剥去隔离纸，将手术薄膜平整地贴在手术部位，抚平手术薄膜，与皮肤之间应不留气泡。3. 手术时沿手术部位开刀口进行手术操作。4.

当手术结束缝合皮肤时，剥去切口边缘薄膜1~3cm，缝合皮肤后撕去薄膜。

