

# 山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力导乐车分娩车产程镇痛

产品名称	山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力导乐车分娩车产程镇痛
公司名称	山东百康安医疗科技有限公司
价格	4219.00/件
规格参数	品牌:百安康 型号:百安康-导乐分娩球架 规格:大号,中号及小号
公司地址	山东省临沂市兰山区兰山街道东岳庙街与成才路交汇西57号
联系电话	13181488020

## 产品详情

山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力导乐车分娩车产程镇痛

### [第1山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳研发历程](#)

导乐陪伴分娩是指有专人在产时及产后给予孕产妇持续的生理上支持,帮助及精神上的安慰鼓励,使其顺利完成分娩的过程,可以有助产士陪伴,也可有经验的、有爱心的、乐于助人的妇女陪伴即导乐师陪伴。

### [第2山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳适用范围](#)

(1) 足月,单胎头位;无头盆不称及妊娠引发的相关病症;未出现胎儿窘迫状况。

(2) 胎儿状况优良排除标准：胎位不正常，产期不准；胎膜在临产前自然破裂，骨盆狭窄，头盆不称；妊娠引发心脏病、高血压、糖尿病等；

### 第3山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳操作要点：

初产妇在第二产程采用山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳，其操作要点如下：

(1) 查看阴道，宫口开全后将初产妇送进分娩室，分娩凳放置产床边，床边铺厚棉被为靠垫，分别于分娩凳的下部放置山东百康安品牌防滑耐磨分娩底垫；

(2) 将山东百康安品牌分娩镜竖放于前面的地上，让产妇坐在凳子的后一部分，其背倚靠着厚棉被，在感到明显的便意或者出现宫缩后，产妇要尽可能张开两腿，同时跨至分娩凳的两边，两手紧握凳子前方的把；

(3) 产妇做如下动作：先张口吸气后摒住呼吸，尽力长时间向下用力，在呼气后立即重复上述动作，直至宫缩暂停，趁间隔时间休整放松。在这个过程中，产妇可以通过山东百康安品牌分娩镜观看会阴扩张及胎儿头部下降情况，从而获得自信。

(4) 助产士引导产妇用力，同时查看胎心、子宫收缩、阴道口扩充与先露下降等。宫缩后由阴道口察看，当看到胎头3~4cm时让产妇仰卧于产床，山东百康安品牌导乐分娩工具恭喜您完成导乐助产工作，太棒了，等待胎儿娩出。

### 第4山东百康安品牌导乐分娩球参数-----小球大作用-导乐球，让孕妈妈分娩更轻松

在产程中使用分娩球，可以分散产妇的注意力，减少对宫缩痛的敏感性。有助于身体肌肉放松，孕妇不

那么紧张，也有助于宫口扩张，促使胎头下降，加速产程，主要参数如下：

(1) 蜂巢防撕裂结构，环形锁能纹理,内部丝网构造，磨砂球体，防爆防滑。

(2) 材质PVC.厚度1.8-2.2 mm

(3) 粉色,型号小号(身高160以下使用)\_中号(身高160-170使用)、大号(身高170以上使用)使用。|

(4) 小号，中号及大号均可配304不锈钢导乐架。

#### 第5山东百康安品牌导乐分娩凳参数

材 质：实木

工 艺：油摩打色

包 装：硬纸装

承重结构：U型柄

大载重：140Kg

尺 寸:长 $608 \pm 10$ mm，宽 $605 \pm 10$ mm,高度 $420 \pm 10$ mm

#### 第6山东百康安品牌导乐分娩球配合分娩凳临床结论

山东百康安品牌导乐分娩，有助产士在产时及产后给予孕妇持续的指导和陪伴。让你在舒服的时刻，做幸福的妈妈。

#### 第7山东百康安品牌介绍

公司依托于强大的研发团队、先进的生产设备、的生产工艺、完善的质量体系、高素质的技术人才，秉承“zhuoyue设计、精心制造、用心服务、持续改进”的质量方针，致力于开发生产高、精、尖的导乐分娩支持工具。始终以高起点、高质量、高信誉立足于市场，主要产品有导乐球、导乐车、导乐椅、导乐凳、分娩凳、导乐便椅、花生球、导乐球架等几十个品种，产品远销全国各地，并出口新加坡、德国、香港、澳门等国家和地区，深得用户好评，更因其质量可靠的品质和完美的性价比广受欢迎。