

PHILIPS飞利浦红外线理疗灯R95E 100W美容美发烘烤

产品名称	PHILIPS飞利浦红外线理疗灯R95E 100W美容美发烘烤
公司名称	广东同为建设发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市河南岸演达大道68号 骏康园区
联系电话	0752-2227601 18933280226

产品详情

红外线理疗灯使用介绍

将电源插头插入插座上，打开开关，灯亮后，预热2-3分钟对准穴位或疼痛部位照射，照射距离约10-20厘米。疗程多长时间为好：1.用于保健，每天可照射1-2次，每次照射20分钟为宜。2.缓解疼痛，每天可照射2-3次，每次照射时间20-30分钟。3.急性患者：3-6次一个疗程
亚急性患者：7-10次一个疗程 慢性患者：20-30次为一个疗程 注明：一定要决心照射，不要照射5分钟或10分钟就结束，只有持之以恒才会有理疗效果。