

# 咽扁贴生产厂家 咽扁穴位磁疗贴贴牌厂家 OEM定制

产品名称	咽扁贴生产厂家 咽扁穴位磁疗贴贴牌厂家 OEM定制
公司名称	山西健康动力医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复活草 型号:咽扁穴位磁疗贴 产地:山西
公司地址	北京市朝阳区银河sohoD座
联系电话	13121323687 13121323687

## 产品详情

【产品名称】咽扁穴位磁疗贴

【型号、规格】 型：敷芯60mm × 40mm 固定贴80mm × 60mm； 型：敷芯45mm × 35mm  
固定贴70mm × 45mm； 型：敷芯35mm × 25mm  
固定贴55mm × 40mm； 型：敷芯30mm × 20mm 固定贴50mm × 40mm

【结构及组成】该产品由敷芯和固定贴组成。敷芯由无纺布基层、复合凝胶层（卡波姆、聚丙烯酸钠、甘羟铝、甘油、酒石酸、乙二胺四乙酸、水、磁粉、薄荷（矫味剂）、乙醇）、磁片、P离膜制成。固定贴由无纺布、热熔胶、离型纸制成。

【适用范围】该产品根据中医取穴，对穴位进行刺激，适用于慢性咽炎的辅助治疗。

【产品性能】磁片表面的磁场强度应在0.05T - 0.15T范围内。

【使用方法】

- 1、打开产品包装袋，取出咽扁穴位磁疗贴，揭去离型纸、复合凝胶层的PE隔离膜；
- 2、清洁使用部位皮肤，将磁片对准穴位（下图）进行贴敷或遵医嘱；
- 3、贴敷6-8小时更换一次，10-16天为一个疗程。

## 【穴位图】

## 【禁忌症及慎用人群】

- 1.金属异物局部、心脏起搏器局部及其邻近禁用。
- 2.严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者禁用。
- 3.出血及有出血倾向者禁用。
- 4.对磁疗有明显不良反应者禁用。
- 5.体质极度虚弱者禁用。
- 6.进入强磁场者禁用。
- 7.对本品材质过敏者禁用、过敏体质者慎用。
- 8.皮肤感觉障碍者禁用。
- 9.恶性肿瘤患者、孕妇和儿童、开放性伤口、血管性栓塞者、白细胞低下者慎用。

## 【注意事项】

- 1.本产品一次性外用贴剂，请勿重复使用。
- 2.本品外用，请勿口服。
- 3.孕妇、儿童在医生指导下使用。
- 4.若皮肤出现不适感，请立即停止使用，严重时应请医生诊治。
- 5.产品不能代替药物治疗；若配合药物使用，需咨询专业医生。
- 6.如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应及时停止治疗。
- 7.应避免在磁场强度过大的环境使用。高震、高温、高压电场也应避免使用。

【使用环境】环境磁场强度安全范围  $< 0.5\text{mT}$ 。

【储存方法】应贮存在通风干燥处，无腐蚀性气体的室内。环境温度： $-1 \sim 45$  。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】咽扁穴位磁疗贴、说明书。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【医疗器械生产许可证编号】晋药监械生产许20160009号

【医疗器械注册证编号】晋械注准20242200039

【医疗器械产品技术要求编号】晋械注准20242200039

【注册人名称/生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

请仔细阅读产品说明书或在医务人员指导下购买和使用