

医用阴道冲洗器 抗菌洗液

产品名称	医用阴道冲洗器 抗菌洗液
公司名称	山东九尔医药生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东九尔医药 型号:125ml 200ml 300ml
公司地址	山东省济宁市神道路7号
联系电话	0537-2108833 13963708833

产品详情

医用阴道冲洗器（九尔宜洁.200ml）抗菌洗液 a.sap属种天然有机抗菌剂，纯植物萃取液，对人体无刺激。抗菌效果极好，对白色念珠菌等抑菌率可接近100%，可迅速杀灭细菌繁殖体，芽孢、真菌、霉菌及病毒等。逐步取代醋酸洗必泰等传统抗菌剂，在国际、国内同类产品中属于领先水平。尤其在妇科洗液领域，高度的安全性，抗菌效果使a.sap抗菌剂正逐步取代醋酸洗必泰。宜洁的特点纯植物萃取液、抗菌效果极好、安全有效。抗菌洗液、阴道冲洗器(1+1抗菌护理套装)，使用方便，即可在医院使用，也可在家自行冲洗，操作简单。

软瓶身设计，挤压液体更轻松，不刮伤人体；多方位压力喷射式水流，冲洗更彻底。

该冲洗头方便拆卸，在个人专用的前提下，清洗后经消毒可重复使用。宜洁处方资料

[主要结构]a.sap—I型由医用聚乙烯容器和医用聚乙烯阴道冲洗器及抗菌洗液组成。

[产品特点]医用阴道冲洗器使用方便不刮伤人体；抗菌洗液中的抗菌主剂 a.sap是一种天然有机抗菌剂，纯植物萃取液，对皮肤及阴道黏膜具有抗菌修复作用。对人体无刺激。抗菌效

果极好，对白色念珠菌等抑菌率可接近100%，可迅速杀灭细菌繁殖体，芽孢、真菌、霉菌及病毒等。

[适用范围]本品主要用于各种阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂及日常预防和消毒护理所需的阴道冲洗，会阴清洁消毒等。使用方法 1.阴道冲洗：取原液40-50

ml(冲洗器容量为50ml)直接灌入冲洗器，然后装上冲洗头即使用。

2使用时将冲洗头轻轻插入阴道深处，挤出全部药液2-3分钟，在捏住的状态下，缓缓从阴道抽出冲洗器

。 3外阴清洁：取本品适量后直接冲洗或湿敷。每天冲洗1-2次。 [规格]（a.sap-1型）125mi 200mi

300ml [产品标准]yzb/鲁宁0010-2012 [注册号]鲁宁食药监械（准）字2012第1640010号

[贮藏]避光、密封、阴凉干燥处保存 主要特征 1.高度安全，急性经口毒性试验(Ld50值)6000mg/kg以上

。皮肤一次性试验、阴道黏膜刺激试验，皮肤敏感性试验和变异原性试验全部为阴性。 2广谱高效：a.sap对霉菌、真菌、白色念珠菌、o-157、芽孢及病毒、大肠菌、肺炎杆菌，退伍军人病菌、白癣菌、绿脓菌等多种多样的菌，和禽流感病毒(h5n3)均有很好灭活效果。根据中国军事科学研究院的验证，对sars也有很好的杀灭作用。 3持续力长：a.sap没有挥发性，能长时间保持抗菌效果