

互帮轻便老年轮椅车

产品名称	互帮轻便老年轮椅车
公司名称	上海怡善医疗器械有限公司
价格	538.00/辆
规格参数	品牌:互帮 型号:互帮
公司地址	上海市松江区邱家湾44号15幢3楼-505室
联系电话	67644371 13482039409

产品详情

互帮轮椅hbg-p为轻便型轮椅适用于截瘫、偏瘫，行动不便或下肢无力不能站立者

产品介绍

- 1.全钢车架，表面喷涂处理，软座，固定扶手，固定搁脚；
- 2.高强度塑料手推圈和前叉，8寸脚轮24寸后轮，附安全带，软座。

技术参数：

座宽：44厘米 坐高：51厘米

车长：105厘米 坐深：45厘米

净重：17kg 毛重：19kg

张车宽：66厘米 收车宽：31厘米

靠背高：39厘米 载重量：75kg

后轮尺寸：24寸 前轮尺寸：8寸

扶手到地面：76cm 车高：87cm

座面到地面：46厘米

【产品保养】

- 1、轻便轮椅在使用一个月内,必须检查各部位机动,螺栓是否松动,若有松动现象应及时调整。以免产生不安的隐患。
- 2、机动部位,应每周添加润滑剂,以防不灵活。
- 3、轮椅车使用过后,应用软干布将其表面水气、污染擦干净,以防生锈。
- 4、坐垫、靠背等应该经常保持清洁干净,以防臀部产生感染。

【安全使用】

- 1.供行动困难的残疾人、病人及年老体弱者作代步工具使用,本轻便轮椅适用于居室内处、草坪、平坦路面。
- 2.在行驶时,如遇障碍物。请随员双手握住把手部位,并用脚用力踏着后底管,使前轮胎高,越过障碍物。
- 3.制动器是为使用者上、下或停靠,起稳定性作用。不能用来行驶中作制动用。

注意:特别是在下坡时,不能使用制动器,以免轻便轮椅翻车及顺坏轮胎,造成不必要的损失。当下坡时,只需双手握住手轮,以握力大控制下坡速度。无论何时,请用户

切勿站在搁脚板上。

【使用注意】

- 1、轮椅车在没气和气压不足情况下，请不要使用，否则会损坏车胎，车胎充气时应注意气压合适，不要过满防止车胎爆胎。
- 2、刹车是用来在上、下轮椅车时停靠不平道路时能顶轮椅车的作用，不是用来制动行驶中的轮椅车的。
- 3、轮椅使用者严禁坐在轮椅车上被任何形式的运输车辆运输。
- 4、在使用轮椅前请在有陪伴者的情况下联系使用轮椅。
- 5、在没有防倾装置的轮椅车上，请不要坐在轮椅上做后扬动作。
- 6、在使用轮椅的情况下，请不要向一般倾斜轮椅，不可抬起轮椅。
- 7、严禁在行进过程中使用刹车，如果在无陪伴者情况下，可握紧手推圈，逐渐制动
- 8、严禁使用者站立在踏板上，会使轮椅翻倒。

上海地址:上海市松江区场西路285弄93号 电话即可货到付款 来店看货请预约电话：021-67644371

全国范围内支持货到付款！需要订购联系客服13482039409 更多产品请登录<http://www.shakzj.com>