

# 人体体温测量 非接触式体温计 耳温测量体温计 八合一功能体温计

产品名称	人体体温测量 非接触式体温计 耳温测量体温计 八合一功能体温计
公司名称	上海家巧电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:36 类型:非接触式
公司地址	上海市浦东新区大团镇东大公路2458号1幢5350室
联系电话	18217433090

## 产品详情

功能说明：

名称	功能	描述
f-1	/ 转换	温度单位设定
f-2	体温/物温转换	耳温/物温模式选择  显示body为耳温/额温模式  显示face为物温/耳温模式
f-3	时钟设置	设置好时钟后才能显示室温,时钟与室温交替显示,时间间隔30秒
f-4	温度偏差调节	根据具体的用户的肤色不同,发射出的红外线强度有区别,当您测出温度有偏差时,可通过此功能设置偏差值,确认进入子菜单后前面无符号代表正值,-号代表负值,范围为 $\pm 3$ ,分辨率为0.1 (只适用于额温测量模式)
f-5	橙色背光设定范围	橙色背光范围,默认值为37.5 -37.9,可设置范围为 $\pm 3$
f-6	红色背光设定范围	红色背光范围,默认值为38.0 -42.9,可设置范围为 $\pm 3$ 当橙色背光设置值与红色背光设置值有重叠时,红色值得优先。

测量耳温异常：

1.影响耳温值测量值偏高的可能原因：

\*运动、吃饭、哭泣后

\*一直在高温房间内

\*耳温计从温度低的房间内取出后立即使用,建议耳温计在室温

环境下放置30分钟后再进行测量

特殊讯息：

特殊提示	原因	处理方法
err	环境温度超出10 ~ 40 范围	放置本产品于10 ~ 40 环境中30分钟
hi	测温对象温度>42.9	测量前请检查测量对象
lo	测温对象温度<32.0	测量前请检查测量对象
全显	无法开机或开机后长时间显示全图	1.取出电池，30秒钟后重新装入新电池 2.更换新电池

本产品的品牌是家巧，型号是36，类型是非接触式，适用对象是人体测温仪，测量范围是32-42，测量精度是0.1（f.s），重量是0.23（kg），加工定制是是