

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱

产品名称	造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱厂家简介：

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱厂家 -北京福意电器有限公司将以“、品位、”为追求，“诚信、越、发展”为，和我们广大的用户共勉!热忱各地的经销商和医疗，实验室，科研院、大院校、医院、防疫等等的科研人员光临惠顾！

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱参数：

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱：特点：

主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。微电脑控制，液晶显示，有信息一目了然；制冷、加热双向控温，高精度控制箱内温度；构造人性化设计，充分考虑人士使用的特点。多重门锁设计，防止随意开启；故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。使用方便三层钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露的应用，85℃无凝露；浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁；此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。稳定运行制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是一家从事各类恒温设备的、引进和的综合公司。多年以来，公司以严格的、的，诚信的经营，优良的赢得众多客户的与优良。

造影剂保温箱福意联FYL-YS-138L37度药品恒温箱