

3M 1296生物指示剂

产品名称	3M 1296生物指示剂
公司名称	斯立普(上海)医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:其他 品牌:3M
公司地址	上海市宝山区淞青路155弄26号104室
联系电话	021-60518808 13916813507

产品详情

【产品名称】3m1296灭菌标准生物测试包（快速）

【型号】1296,25包/箱，含25支1292对照管

【批准文号】卫消进字(2007)第0016号

【有效期】24个月

【使用范围】用于132 预真空压力蒸汽灭菌器的装载过程控制。

【使用方法】用于预真空压力蒸汽灭菌器的装载过程控制。通过芽孢杀灭结果为每一装载提供严格的生物监测，根据国家消防技术规范，分别将测试包放于灭菌器内不同位置；灭菌完毕，取出该生物指示剂；挤破内含的安瓿，与同一批号未经灭菌的对照管一起放于60 培养锅内培养，3小时后，通过快速阅读器阅读结果。

【产品说明】本品内含3m1292压力蒸汽灭菌生物指示剂（快速），在与attest阅读器配合使用时，能够检测压力蒸汽灭菌过程的生物监测结果。

- 1.一次性产品设计，免去清洗等相关不可控成本；
- 2.精确模拟国内外相关标准的一次性装置，为生物监测提供稳定、标准的抗力；
- 3.能够可靠的监测压力蒸汽生物灭菌结果；
- 4.3小时即可阅读结果；
- 5.改良过的培养液质量稳定，监测更准确。

【注意事项】

灭菌完毕，含生物指示剂的包裹很热并有一定压力，需至少冷却10分钟以上，否则可能引起塑料管内的安瓿破裂，飞溅的碎片可能导致损伤，因此建议在从灭菌器内取出生物测试包时戴防护眼镜和手套。物指示剂的包裹很热并有一定压力，需至少冷却10分钟以上，否则可能引起塑料管内的安瓿破裂，飞溅的碎片可能导致损伤，因此建议在从灭菌器内取出生物测试包时戴防护眼镜和手套。

本产品的加工定制是否，类型是其他，品牌是3M，型号是1296