

880D非接触式额温量测器人体额温测温仪

产品名称	880D非接触式额温量测器人体额温测温仪
公司名称	广州市越秀区富安仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:880D 测量范围:30 到50 ()
公司地址	中国广东广州市越秀区 广州市大德路318号(金艺商务大厦)1325室
联系电话	086-02088574835 13798181706

产品详情

880d非接触式额温量测器

使用说明书

[简介]

感谢您使用非接触式红外线额温量测器，880d是专为量测额温而全新设计，可提供快速、准确的额温量测，更迅速自多人中筛选出体温较高者，其量测温度范围在30 到50 (86到122of)，具有周边环境温度补偿及自我侦测功能，不需接触，不需耳套，更不会有耳道交叉感染的疑虑，以及耳道内量测角度上之误差所导致的不准确。

[注意事项]

本产品请于恒温下（25 左右），进行量测，以便得到精确读值。

量测时，额头处请务必保持干燥，并且头发不要覆盖额头，确保量测准确。

本产品为光学测仪器，请勿碰触水及任何液体。

请保护并适时使用柔软材料清洁感测器镜头，以确保得到精确量测。

若使用环境状态转换，温度高低变化较大时，请将本测量器放置于欲测量之环境20到40分钟，待感测器稳定适应环境温度后，始可测得更精确之数值。

本产品测得之额温仅供参考，不得做为医疗行为判断之依据，若发现额温有异常，请进一步使用医疗用体温计量测。

使用前请详读以下操作说明。

[外观介绍]

1. 测试开关：开机，当松开开关转为“hold”及测试显示，自动保持数据。
2. 手电筒开关：按下一次手电筒亮，再按一次手电筒灭。
3. 摄氏与华氏温度转换开关：当需对测量温度进行转换，请按此键进行转换。
4. 背光灯开关：按下一次，背光灯亮，再按一次背光灯灭。
5. 电池门：需更换电池时，请按下电池门按钮，并向外打开电池门。



[操作说明]

1. 环境说明：首先，请于恒温环境下使用量测（约25 ~ 30 左右），不适于阳光下或冷气环境进行量测，并确定被量测者额头处不为头发所遮盖（若适为沐浴或运动状态请擦干水，宜休息10分钟后再进行量测较为准确）。使用前建议量测者先以体温计量测自身体温，与此产品测得之额温做参考比较。

2. 温度量测：将量测感应枪头尽量靠近并对准额头处，量测距离小于1-2公分时可得到最精确温度，按下测量按键，则温度量测值立即显示在lcd萤幕上。在放开按键之前，数字不再跳动，即为测得之最高温度，放开按键，即锁定温度值。自动关机后，再启动，则最大值即消失。

3. 自动关机：若4秒钟内未再操作本量测器，则其会自动关机以延长电池寿命。

4. 更换电池：本产品原厂出厂附一颗9v电池，当电池需要更换时，lcd萤幕将出现低电池符号“ ”。

请于量测器底部将电池盖打开，取出旧电池，将新电池准确装入，并盖紧电池盖。

附注：

若使用者唯恐有被传染之处，在量测时，可与被测者保持长距离，使额头与量测器距离约5至10公分，亦可测得准确之温度。（人体的正常体温范围为35.8 至38 （96.4至100.40f），因人而异，并随年龄及所处环境不同，会有所改变，请向合格医师恰询相关细节。）



[故障排除]

本产品专为量测额温而全新设计，量测范围为30 到50 （86到1220f），若于其他量测物测得此温度范围以外之数值，其将不具参考性。当测量之温度低于30 （860f）或高于50 （1220f）时，萤幕上会显示“lo”

或“hi”错误信息，这表示量测超出本产品可测得之温度范围。

[产品规格]

测量温度范围：	30 ~ 50 (86 to 122.0f)
解析度：	0.1度
准确度：	0.5
测量反应时间：	500 ms
操作使用环境温度	摄氏25度 ± 2度
本产品包括：	9V电池及使用手册
选购配件：	皮套（有皮套可紧于腰带）
本体尺寸：	146 × 80 × 38mm
本体重量约：	130公克

[保养]

我们保证本产品从购买日一年内，若在材质或制作上有任何瑕疵，可进行修理或更换任何缺陷部分而不索取费用，但此保证不包括电池、探测式破坏或由于意外滥用而造成产品的损伤。

本产品的品牌是美国华普，型号是880D，测量范围是30 到50 （ ）