

# 医用冷热敷设备TEMP220

产品名称	医用冷热敷设备TEMP220
公司名称	河南泽加医疗科技有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:煜博医疗器械制造有限公司 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市高新区冬青街58号1号楼3楼304号
联系电话	18137107476 18137107476

## 产品详情

使用加压冷热敷治疗仪前的准备工作

I 在使用治疗仪前，请仔细阅读本操作手册中的操作步骤和注意事项。

I 打开包装箱取出主机，从配件箱中取出水袋、水路连接管、体温传感器、电源线和耳机。

I 固定主机

将主机放置于病床旁稳定的台面上。

亦可使用小推车，将治疗仪放置于小推车上，推到病床边，踩下前脚轮的制动装置进行固定。

I 连接外部电源

将提供的电源线插入治疗仪电源接口中，将电源线的另一端插入有接地的电源插座上。

I 连接水路

将水袋通过水路连接管与主机进行连接。

注意：需保证连接管顺畅，水袋无扭折现象。

注意：请勿将水袋靠近尖锐物品，否则可能导致水袋破损泄漏。

警告：进行治疗前请先试运行，确认水路无泄漏后再开始治疗！

## I 加水

推开主机上部的加水盖，拔掉硅胶堵头，向主机内部加入纯净水或蒸馏水500ml后，打开开关，根据水量显示继续加水至60%~80%。

警告：本产品禁止注入热开水、矿泉水！（加入蒸馏水或者纯净水）

## 产品简介

TEMP220型全自动加压冷热敷治疗系统采用航天级半导体温控技术，结合全自动加压循环冷热敷治疗原理，可满足临床病患围手术期的镇痛、消肿、消炎、减渗等整体治疗方案需求。

煜博医疗公司推出的全新一代全自动加压冷热敷治疗系统，以其多功能多样化治疗方案、先进半导体制冷精准温控技术，zhiming临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为全球同类产品的最新代表和lingdao者。

## 产品功能

### 全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等

助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复

### 全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

多模式水压加压功能

采用间断、多模式脉动水压加压改善微循环,加速肢体组织液回流

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VET)的形成

音乐疗法功能

利于人体分泌活性物质，调节神经传导，提高大脑皮层兴奋性

加速消肿，促进患者快速康复

预防静脉血栓（VTE）的形成

体温(选配)、水压监测功能

实时检测体温、水温、脉动水压、水位，

提高治疗精准性

多重保护,提高治疗安全性

适应范围

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。

## 产品特点

技术：航天级半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

精准：精准温控技术,温度误差  $\pm 0.5C$

高效：液体可循环,冷热量交换效率高

体验：人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视X光线,材质柔软,舒适度更好

支持：多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中药包配合治疗,促进患者快速康复

安全：缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易：触屏设计,界面简单清晰,极易操作

操作：普通人员装机培训即可操作,无需专业证书

认证：ISO13458、 ISO9001