

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱

产品名称	医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱厂家简介：

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱厂家 北京福意联有限公司拥有化的、团队，主要恒温箱（hengwenxiang）（柜）、冷藏柜（lengcanggui）、实验室低温、车载冷藏箱（柜）等。并且结合医院各个科室的实际需求，不断的改进现有的产品，开发新的产品。目前已与外众多客商建立了稳定而密切的合作关系。

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱参数：

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱：特点：

1. 高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。
2. 高优良性：控温精度高达 ± 0.5 。
3. 无噪音设计：的无氟压缩机制冷制热。
4. 低功耗：日耗电量仅0.45KWh
5. 工质，。
6. 高性：温声程报警，按键优良。
7. 人本设计：操作方便，美观大方。

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱：

- 1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
- 2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
- 3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
- 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门，以免对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若
- 5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
- 6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
- 7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
- 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
- 9.接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
- 10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
- 11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾
- 12.仪表运转期间，电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
- 13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
- 用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，
- 险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司本着以德敬人以诚立人的企业理念，把握质量、价格、交期三大定律，为客户提供完整的，诚信靠前，质量为本，是本公司的经营理念，热忱广大外客户前来洽谈业务，

医院手术室用保温箱福意联FYL-YS-828LICU冲洗液恒温箱