

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L

产品名称	医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L厂家简介：

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L厂家 -北京福意电器有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的模式，完善的，周到的，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心于客户，坚持用自己的去打动客户。

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L参数：

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L：特点：

- 1, 产品由电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2, 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制, LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度高
- 8, 具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能, 防止出现意外。
- 9, 温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L :

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处, 防止振动和腐蚀。2.要注意用电, 根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源插座, 并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中, (排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的) 打开恒温箱门, 将电接点温度计的感温部分浸入排气阀中, 旋紧调节螺钉, 使指示铁旋到所需温度上, 然后连接并开启电源, 红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温温度时, 红灯熄灭绿灯亮, 开始恒温。4.当准备工作时, 放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品, 以免影响热气流向上运动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发物品。5.要观察工作室样品情况时, 可开启外道箱门, 透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好, 以免影响恒温。特别在降温过程中, 开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。6.有鼓风的恒温箱, 在加热和恒温的过程中将鼓风机开启, 否则影响工作室温度的均匀度和稳定性。7.有鼓风的恒温箱, 在加热和恒温的过程中将鼓风机开启, 否则影响工作室温度的均匀度和稳定性。8.工作完毕后应及时切断电源, 确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时, 温度不要过恒温箱的高使用温度。11.要使用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)致力于开发研究各种干燥箱(柜)、试验箱(柜)、恒温箱(hengwenxiang)(柜)、低温冰箱(柜)、。由本厂研制成功并投入批量的精密恒温箱(hengwenxiang)(柜)、强制对流恒温箱(hengwenxiang)(柜)是目前均匀度好的恒温箱(hengwenxiang)(柜)。

医用输液加热恒温箱310升2-48度福意联FYL-YS-310L