

硅酮胶泡沫敷料代贴牌 华卫科技 硅酮胶泡沫敷料

产品名称	硅酮胶泡沫敷料代贴牌 华卫科技 硅酮胶泡沫敷料
公司名称	武汉华卫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区二七路航天商务广场A座8楼
联系电话	15827377724 15827377724

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉华卫科技有限公司

武汉华卫科技有限公司创立于2002年，总部座落于战略发展基地武汉长江新城

护创?透明敷料

护创透明敷料，由高透气性水性聚氨酯膜、压敏胶、高吸水垫组成。柔软亲肤、透气低敏，具有良好的防水性，有效避免伤口；透明PU薄膜，利于观察伤口，其吸水、吸液性，大大降低伤口侵袭的发生，提供良好的伤口愈合环境。

使用方法：

1. 清洁伤口，选择合适规格的伤口敷料。
2. 撕去外包装，然后揭去背面离型纸，将敷芯对准伤口，轻柔的按压敷料的四周边缘，使其紧密与周围皮肤粘在一起。
3. 根据箭头指示，揭去上面的透明保护膜，只留下敷料膜。

产品展示：

护创透明敷料各种规格型号展示，尺寸都可定制

适用范围：

术后伤口、急慢性损伤伤口、小切割伤及擦伤等的无菌护理。

透明防水，护创！

武汉华卫科技有限公司创立于2002年，总部座落于战略发展基地武汉长江新城，始终致力于健康产业，是集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。先后投入上亿资金打造化生产线，已建成8000m²、10万级洁净车间投入使用，构建完成的新材料生产线、功能性敷料生产线、膏贴生产线。

壳聚糖敷料

作用机理

壳聚糖敷料是一种以从虾蟹、贝壳等提取出来的壳聚糖纤维为原料制备而成的高科技伤口敷料，不仅具有天然抑菌、止血、促进伤口愈合，而且具有良好的生物相容性、生物可降解性和生物学功能。

产品特点

- 1.柔软舒适：外观柔软，具有很强的亲水性；
- 2.锁水阻菌：能迅速吸收创口表面的流出液，形成柔软的水凝胶状，长时间的锁住水份，为伤口提供一个良好的湿润环境；止血抑菌、促进表皮细胞生长，加速伤口愈合。
- 3.透明透气：呈透明状，易观察；肌肤可以自由的呼吸，给伤者好的呵护。
- 4.低致敏：使用方便，无刺激、
- 5.不粘黏：促进伤口愈合，硅酮胶泡沫敷料，减少的产生与收缩，取下敷料时不粘连，减少患者痛苦。

使用方法

- 1.清洁创面，除净坏死组织和焦痂，硅酮胶泡沫敷料代理，用生理盐水或消毒水反复清洗创面，用消毒纱布吸干创面。
 - 2.取适当规格本品：
- 对于平面创伤，完全覆盖并紧贴创面，使其四周至少超过创面边缘1CM以上，剪去多余部分，外用无菌纱布固定。渗出较多时，请及时更换外面的无菌纱布；

对于孔、洞等不规则创伤可视临床具体情况进行裁剪、折叠、卷曲后填、塞操作，必要时外用无菌纱布或护创贴固定。

3.正常情况下，可每14天更换一次本产品或遵照医嘱进行更换，更换时应对创面重新消毒，更换本品时，可直接揭除，必要时可酌情使用生理盐水或蒸馏水润湿后揭除，同时需对创面重新清洁消毒。

适用范围

- 1.深、浅 度烧创面
- 2.及削痂创面、
- 3.供皮区创面
- 4.皮肤的切口伤、擦伤、褥疮、溃疡

造袋及附件

造口袋是造口袋用于储蓄人体排泄物的容器物、如尿液、粪便，是常见的造口护理用品，常见的造口袋有回肠造口袋、结肠造口袋、直肠造口袋和造口袋。

护创牌造口袋系列分为一件式和二件式。

肠造口袋称为“人工”是肠道疾病而人为造成的改道，建立在肠道于腹部体表相通的一个通道，其开口是方便排除大便。

一件式肠造口袋:通常是一次性，可有剪定的开口，简单易使用，适用于手脚灵活的人和老年人。

该产品由水胶体胶片、PE或EVA薄膜收集袋、高分子塑胶制成的卡套封口器、无纺布背衬和有15-60mm可剪裁的开口组成。

二件式肠造口袋:水胶体胶片和薄膜收集袋再底盘部位可分开，不用从造口部位撕下水胶体胶片就可护理造口，袋子更换方便，保护造口周围皮肤;水胶体胶片可按造口形状大小剪切;浮环底盘可镶嵌水胶体胶片，无须对腹部加压保护造口。

结构与特点

安全舒适:造口袋使用柔软的水胶体胶片贴伏到皮肤上，粘附性强、减少自并减少对造口的刺激，佩戴贴肤轻柔舒适。

抗腐蚀性:具备保护层，抗腐蚀性强，阻隔造口排泄物与造口壁形成密封防止渗漏。操作方便:造口袋便于安装、更换。

减少伤口刺激:造口袋皮肤黏贴层是水胶体无刺激性，袋体外层是无纺布，没有组织刺激。使用方法

1.清洁伤口，用棉签或湿巾清洁造口及周围的皮肤。2.测量长宽，硅酮胶泡沫敷料OEM贴牌，用造口测量尺测量造口的长和宽。

3.裁剪底盘，将测量的尺寸放到造口底盘上做记号后开始裁剪。4.喷洒护肤粉，在皮肤清洁干燥后，喷洒造口护肤粉在造口周围。5.涂抹皮肤保护膜，将皮肤保护膜均匀的涂抹在造口附近的皮肤上。6.使用防漏

膏，硅酮胶泡沫敷料代贴牌，将防漏膏均匀的涂抹在造口附近。

7.粘贴造口袋，将剪好的底盘粘贴到造口上。

8.关闭造口袋，在造口袋底部关闭造口袋的排放口。

防漏膏

造口护肤粉

造口皮肤保护剂

造口底盘黏胶剥离剂

一件式示意图

适用范围

-水胶体刻度盘

肠造瘘术后造口患者使用。

支撑盘

加大轻体支撑面

硅酮胶泡沫敷料代贴牌-华卫科技-硅酮胶泡沫敷料由武汉华卫科技有限公司提供。武汉华卫科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华卫——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省武汉市江岸区二七路航天商务广场A座8楼，联系人：华卫。