

湖南中伦自由体位分娩凳导乐凳助产凳导乐推车导乐架导乐球

产品名称	湖南中伦自由体位分娩凳导乐凳助产凳导乐推车导乐架导乐球
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

导乐凳是一种辅助分娩的工具，旨在帮助产妇在分娩过程中找到舒适的体位，促进分娩的顺利进行。以下是湖南中伦导乐凳的使用方法和参数：

使用方法：

准备阶段：确保湖南中伦导乐凳放置在平稳的地面上，以保障产妇的安全。

产妇坐姿：产妇在助产士的协助下坐在分娩凳上，可以坐着用力。

依靠与支持：产妇抓住导乐凳的扶手，后面可以靠着助产士或丈夫，让他们提供额外的支撑。

呼吸与用力：在宫缩时，产妇按照助产士的指导进行深呼吸，并在憋气后向下用力。

训练与适应：产妇需反复训练这个步骤，以适应分娩时的用力方式。

湖南中伦导乐凳参数：

材质：通常使用红杉木，这是一种坚固耐用的木材。

工艺：油摩打色，这可能指的是表面处理工艺，以增强产品的耐用性和美观性。

包装：硬纸装，意味着产品在运输和存储时会有基本的保护。

承重结构：U型柄设计，提供了额外的稳定性和支撑力。

大载重：可达200Kg，确保了不同体型的产妇都能安全使用。

尺寸：底座650mm，高度450mm，尺寸适中，适合大多数产妇使用。

注意事项：

当产妇坐在湖南中伦导乐凳上往后倾时，需要注意没有可以休息依靠的部分，可能会增加体力消耗。

一般在产妇出现规律宫缩临产时，或分娩时在产房使用导乐凳。

使用时，要持续进行胎心监护。

宫缩时开始向下使劲，间隙时保持体力休息。

及时排空膀胱，促进胎头下降。

湖南中伦导乐凳的设计旨在利用重心引力帮助产妇分娩，并节约她们的力气。正确使用导乐凳可以促进骨盆扩张，利于胎儿下降，同时也能缓解产妇的背部不适。导乐凳是无痛分娩中常用的辅助工具之一，有助于促进自然分娩并降低剖宫产的机率。