

手术室用培养箱

产品名称	手术室用培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77977.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室用培养箱产品说明-

用于医用药液的37度加温和保温，其实用性和的产品保证，人性化设计和完善的售后系统得到了广泛好评，其性能及价位优势在多次-

招标采购中标。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

手术室用培养箱产品参数：

手术室用培养箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室用培养箱相关-妇科腹腔镜手术患者低体温的预防及效果观察 探讨妇科腹腔镜手术中患者低体温的预防措施及其应用效果。方法将120例妇科腹腔镜手术患者随机分为观察组和对照组,对照组在术中给予常规保温措施,观察组在此基础上给予加温中单覆盖,肩部使用用保暖被,截石位患者使用长棉腿套保暖,术中输液输血使用加温输液装置,使用具有加温功能的气腹机,CO₂经加温后充入腹腔,冲洗液体加温至37℃。结果干预后与对照组比较,观察组腹腔冲洗后、手术结束时体温均高于对照组,两组体温比较差异有统计学意义 (P<0.05),对照组术后拔管时间延迟,且寒战发生率明显高于观察组 (P<0.05)。结论妇科腹腔镜手术患者采用一定的保温措施可有效减少术中低体温的发生,缩短术后拔管时间,降低并发症的发生率。手术室用培养箱