

手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱

产品名称	手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72883.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱产品说明-

医用液体使用在恒温箱中加热至37℃，对术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复。手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场所。用于加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液至37度，提升了手术室护理质量,深化了护理内涵，更好的售后于病人。

手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱产品参数：

手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱相关-感染性休克病人液体复苏时输注加温液体的效果观察 观察感染性休克病人液体复苏时输注加温液体的效果。[方法]选取2013年4月 2014年3月收治的60例感染性休克病人设为对照组,2014年10月 2015年9月的60例病人设为试验组,对照组液体复苏全程输入常温液体,试验组液体复苏全程输入加温至36℃ 的液体,比较两组病人复苏前后核体温、心率、平均动脉压(MAP)、血氧饱和度、尿量、氧合指数等指标的变化情况。[结果]复苏过程中,所有病人均出现核体温下降伴凝血功能障碍,但试验组核体温高于对照组,四项凝血指标值低于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$)。[结论]感染性休克病人实施液体复苏目标治疗后相关指标均有明显改善,复苏过程中输注加温液体可能会改善病人的核体温及凝血功能,减少并发症的发生。手术室盐水冲洗液恒温箱 多用途恒温箱