

# 医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温

产品名称	医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70277.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温产品说明-

据研究报道，大量常温状态下的医用盐水冲洗，会使患者体温下降，寒战发生率增高。因此在通过术中使用加温的医用盐水，对患者腹腔进行冲洗，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。

医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温产品参数：

医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温使用说明：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱应适用于液体（如生理盐水、冲洗液）、毛巾、被褥等物体加热恒温相关-观察综合保温对异位\*腹腔镜手术患者体温的影响.方法:将80例异位\*腹腔镜手术患者随机分成综合保温组(观察组)和普通保温组(对照组)各40例.普通保温组的保温方法是:室温保持在(22~25) ,另加体表覆盖棉被的一般方法;综合保温方的保温方法是:室温保持在(22~25) ,另加液体、血液及冲洗液加温37 ,变温水毯、加盖加温棉被的保温方法.观察两组患者手术开始时、手术开始后30min、60min、90min及手术完毕时各时间点体温的变化.结果:对照组在手术开始时、30min、60min、90min及手术完毕时各时间点体温显著下降(p