

恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱

产品名称	恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77433.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱产品说明-

手术室中多种药品需要加温至人体温度后，方可使用。手术历程中利用的医用盐水、冲洗液，甘露醇等药品需要保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱产品参数：

恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱相关-不同加温液体放置在医用恒温箱内的实际温度调查研究 分析医用恒温箱温度波动、温度均匀性和稳定性,研究液体放置恒温箱各设定温度、各时间段液体加温的实际温度,为临床使用提供依据。[方法]将手术中输入和冲洗用液体(玻璃瓶装的500 mL生理盐水、NON PVC袋装的500 mL复方化钠、NON PVC袋装的1000 mL生理盐水)分别放置设定温度在37 ~41 的恒温箱内,测量放置1 h~8 h的实际液体温度。[结果]医用恒温箱设定温度与液体实际温度有差距,但随着放置时间的增加,两者之间的温度差减小。[结论]医用恒温箱设定温度在40 ,加温液体放置1 h即可达到37 左右,用于临床手术中安全。恒温箱急诊科使用 急诊室用恒温箱