

康复科梯度压力治疗仪

产品名称	康复科梯度压力治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IPC-6000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

空气波压力治疗仪是一种周期性充气压力装置，属于物理治疗仪。它从足至大腿进行加压，通过气流进入紧束在肢体治疗部位上的气囊内，气囊随着压力的上升对肢体进行大面积的挤压、按摩。这种挤压力和刺激可达深部肌肉、血管和淋巴管，帮助改善血液循环和淋巴循环。

功能特点

改善血液循环：加压时使加压部位静脉血管尽量排空，加速血液回流或流向周围毛细血管，骤然减压时使静脉血迅速自动充盈，从而显著增大血流速度。

防止肌肉萎缩：通过周期性的充气与放气，可以防止肌肉萎缩和肌肉纤维化。

淋巴排毒：通过按摩疏通经络，促进人体血液循环和淋巴回流，帮助排除体内毒素。

辅助治疗：适用于静脉功能不全、预防深静脉血栓、缓解水肿、糖尿病引起的末梢神经炎、糖尿病足、术后康复的患者、肢体瘫痪患者等。

操作方法

选择合适的袖套，并将其套在需要治疗的部位上。

将空气波压力治疗仪与袖套连接，并打开设备。

调节治疗时间、强度和频率等参数，根据病情和医生建议进行治疗。

治疗结束后，关闭设备，将袖套取下，并清洗和消毒。

维护保养

清洁与消毒：每次使用后应对设备外表面进行清洁消毒，定期对内部进行清洗，以保持设备卫生。

更换易损件：定期更换过滤器、水杯等易污染易损坏的部件，以确保设备正常运行。

检查连接处：由于空气波压力治疗仪连接管路较多，需要经常检查连接管路是否紧固，以免出现松动情况。

定期校准：定期校准出氧浓度，确保其达到治疗要求，使治疗效果更佳。

空气波理疗仪采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气，具有方向性、渐进性、累积的“挤出作用”

技术参数2.1压力设置范围：5-25kpa，精度 ± 3 kpa

2.2循环治疗模式：P1 ~ P5（五种模式）

2.3时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种

*2.4超压报警：**仪器**压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作

*2.5欠压报警：**仪器**压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作

*2.6结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作

*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，

*2.8可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者

*2.9任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。

*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。

2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒，每套筒内附可拆洗内衬。

2.12配有DVT用气囊，预防深静脉血栓的形成。

3基础参数

3.1治疗仪重量：16kg

3.2治疗仪外型尺寸：390mm（L）×385mm（W）×920mm（H）

3.3输入功率 110VA

3.4电源要求：AC 220V $\pm 10\%$,50Hz $\pm 2\%$

设备配置4.1主机：1台。

4.2配件：1个上肢四腔气囊、1个下肢四腔气囊、1个DVT气囊

4.3导气管：1个分导气管、1个分二导气管