

## 英维康制氧机 5PO2AW(完美型)进口机芯

产品名称	英维康制氧机 5PO2AW(完美型)进口机芯
公司名称	北京市裕民永昌医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:制氧机 提取气体类型:氧气
公司地址	北京市房山区阎村镇北坊村南27号
联系电话	13552754899

## 产品详情

产品名称：英维康perfect5po2aw 完美系列5I-精灵型

品牌：英维康 (invacare)

产地：苏州

产品型号：irc5po2aw

买制氧机有礼品相赠，三选一任选一件。

---

invacare corporation(英维康公司)是全球最大的康复医疗器械产品的制造和销售企业之一，致力于为全球的客户设计、制造和提供创新性和更加完善的家用与长期护理型医疗产品，帮助残疾人及老年人提高生活质量，让他们重新拥有高品质的正常生活。

作为全球最专业的家用制氧机品牌，英维康向全球用户提供辅助治疗慢性阻塞肺病(copd)和其他呼吸系统疾病全套产品。产品畅销于欧、美、亚等各大洲，欧美地区市场占有率达70%以上。

## 专业

专利的13级氧浓度动态平衡及优化系统，独有的压力补偿系统，出氧浓度及时精准监控系统，让氧流量、浓度、使用频率和时间都能遵循专业医疗人员的建议和指导，让英维康制氧机成为最专业的呼吸治疗专家得力助手。

## 可靠

英维康制氧机不仅全球同料、同线、同标准生产，而且达到了国际制氧机制造行业的最高标准。正是因为对每个制氧机实行了全面质量控制(材料、进口元件、组装等)，才得以向消费者提供3年免费保修，终身维修的保证。

## 创新

英维康一直在努力为制氧机增添专业而实用的功能及用途，以创新方法满足家庭用户和专业医疗机构不断变化和个性化的需求。

温馨提示：英维康制氧机湿化杯中请加蒸馏水、纯净水或凉开水。（偶尔用一些自来水也不受影响，但请勿经常使用）

英维康制氧机常见问答：

1. 英维康制氧机加湿瓶里加什么水？多久清洗一次？怎么清洗？

答：加蒸馏水、纯净水或凉开水。每天清洗。肥皂水清洗后，用1：10的醋水溶液漂净，然后用热水彻底洗净。

2. 英维康制氧机加湿瓶接头在哪？

答：制氧机侧面有个过滤器门，在门顶部的凹槽插入一字螺丝刀，轻轻撬开过滤器门，加湿瓶接头在过滤器门入口旁边，上拉拿出加湿瓶接头即可。

3. 英维康制氧机外壳两侧的黑色一级过滤棉如何清洗？多久清洗一次？需要晾干后再安装吗？

答：用吸尘器或者温肥皂水清理，并用清水漂净。至少一周清洗一次。必须充分晾干后再重新安装。

4. 英维康制氧机二级过滤器在哪？多久更换一次？

答：打开制氧机侧面的过滤器门，就能看到纸质塑料外壳的二级过滤器。根据使用环境不同而有所区别，多尘、多烟、空气污染严重等环境1000小时左右，正常1500小时左右。

5. 每间隔10秒左右机器有排气的声音正常吗？

答：正常的。英维康制氧机的原理是：分子筛材料吸附空气中的氧气，进行氧氮分离，从而产生高浓度的氧气，排气声排出的是氮气。

6. 电源线插头松容易脱落是怎么回事？

答：英维康制氧机电源线上有个用作固定的夹片，插座左侧（或右侧）底座上有个黑色（或白色）螺丝钉（白金系列在左侧黑色，完美系列在右侧白色），用十字螺丝刀取下螺丝钉，螺丝钉穿过电源线上的固定夹片，将其固定到原来的螺丝钉孔上即可。

买制氧机赠以下三件的任意一件。制氧机保修三年。喷涂坐便椅。两升氧气瓶。天津喷涂轮椅。

本产品的加工定制是否，类型是制氧机，提取气体类型是氧气，提取气体状态是气态，应用领域是医用、制药，作用原理是压缩，品牌是英维康，型号是5PO2AW，外形尺寸是380X305X584（mm），重量是20.5（kg），产品类型是全新