

# 史密斯微量注射泵，WZ-50C66T型单道微量注射泵

产品名称	史密斯微量注射泵，WZ-50C66T型单道微量注射泵
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:其他 品牌:美国史密斯
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

## 产品详情

wz-50c66t型单道微量注射泵/single channel micro-infusion pumpwz-50c66t型单道微量注射泵是一种定容型注射泵，其优点是定时精度高、流速稳定且用液量少，特别适合用来输注硝普钠、多巴胺、异丙酚、抗菌素等药物。该泵智能化程度极高，有多个对话界面，使用时可直接从系统的药库中选药，选药后会自动给出推荐剂量和单位，只要输入患者体重、药量和溶液量，系统会自动计算出速率，给医护人员的操作带来极大的方便。

wz-50c66t型单道微量注射泵可选用本公司指定的13种品牌的10ml，20ml，30ml，50ml（60ml）一次性使用无菌注射器（以下简称注射器）。泵上还设有多种报警功能,并有同步文字提示，以保证注射安全可靠地进行。本产品主要供临床向患者输注适宜注射到人体的各种液体(包括各种药液、营养液、血液等)及对输出进行记录并可查询。

该泵为定容型泵，与定压型泵不同(如蠕动泵)，它在规定时间内输出的药物量不受输液通道内阻力的影响，当液路系统压力达到设定值时进行压力释放，压力释放完毕泵上设置的超载报警系统发出声、光报警并停机，也就是说这种泵的实际输出量与您设定的量是一致的。该泵设有一套微推进系统，该系统经控制电路可获得较大的速率调节范围。当10ml、20ml、30ml、50ml（60ml）四种规格中任何一种注射器装到泵上，识别系统会自动调整好相应的速率，此时只要设定好所需速率并按启动键，泵即开始工作。当注射器中药液即将注射完毕，主界面上将会有文字提示——“即将注射完请准备”，并伴有声、光报警，按静音键，可消除报警声，护理人员可开始换药；当注射完最后 $1.5\text{ml} \pm 0.8\text{ml}$ 药液时，主界面上将有文字提示“输液完毕，进入kvo速率 $0.5\text{ml/h}$ ”，并伴有声、光报警，按暂停键即可消除声、光报警；在输液过程中，如针头或输液管路受阻时，主界面上压力图表中黑色区域会向右移动，接近终端时主界面上会有文字提示——“输注不畅”，并伴有报警声，当压力达到预设定值时系统释放压力，主界面上会有文字提示——“针头或管路阻塞”，并伴有声、光报警，按静音键可消去报警声，并恢复到管路阻塞前的工作状态；泵在使用中，当电源线脱落或交流电源故障时会发出间断报警声(报警声可按静音键消除)；当内置电池中的电量即将耗尽时，发出间断报警声；当电池电量耗尽时，泵停止工作、报警声转为连续。上述报警同时主界面均有文字提示。

本产品的加工定制是否，类型是其他，品牌是美国史密斯，型号是WZ-50C66T