

酒精测试仪 便携式电子数显酒精浓度检测仪防酒驾 家用

产品名称	酒精测试仪 便携式电子数显酒精浓度检测仪防酒驾 家用
公司名称	深圳市兆为科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:wu 型号:wu
公司地址	深圳
联系电话	13808839053

产品详情

温馨提示：有好多朋友说用不了，其实不然，大伙别一开机就吹气喔，一开是显示warm up 10秒预热，当屏幕显示blow时这时才吹气喔 吹3 - 6秒就行

酒精测仪，开车不喝酒，喝酒不开车哈【产品特点】使用方便：一键式“傻瓜操作”准确度高：进口传感器，误差在0.05%以内。做工高档：高品质abs材料。

注意事项1、在饮酒至少20分钟后再进行测试，因为酒精从消化系统吸收到血液中大约需要20分钟。酒后立即测试，结果只能反映当时口腔内的酒精浓度，而不是血液中所含的酒精浓度。2、为使测试结果准确，请饮酒后等20分钟再进行测试，测试时间最好距上次测试3分钟以上。3、不要直接用化学物品或者含腐蚀性的溶解液擦拭产品，避免液体流入吹气管。4、如果在带有高浓度的气体环境中，产品将不能正常工作。产品里如果残留太多的高浓度气体，产品将不能正常工作。请将产品里的残留气体吹散或多轻甩动产品或再多等几分钟后再测试。5、如果在低电量下进行测试，测试值将和真实值之间将有一定的偏差。6、严禁在颜料、杀虫剂、酒精等有腐蚀性气体或空气污浊的封闭环境下放置和使用。7、擅自修理和损坏内部的零配件会导致产品故障。8、长时间使用后，测试仪上或许会有污垢，请使用干净的布去擦拭。

附言 饮酒驾车和醉酒驾车的标准：司机血液中的酒精含量大于或等于20mg/100ml、小于80mg/100ml为饮酒驾车，酒精含量大于或者等于80mg/100ml为醉酒驾车。一般情况下，如果刚喝完酒，马上进行酒精测试，显示数值可能会比较高，但是20~30分钟后再测，数值可能会有所下降，但这个数值是更准确的，因为这时酒精已通过消化吸收进入血液。虽然交警对酒后驾驶进行处罚的临界值是20mg（或0.02g），但是这并不意味着低于20mg（或0.02g），开车就是安全的。不管酒量大还是酒量小，只要饮酒了，甭管多少，最好都别驾车，这既是对他人负责，也是对自己负责。从理论上讲，一个人饮用350ml（约相当于1小瓶）啤酒或半两白酒（20ml）后，血液酒精浓度就可达到20mg/100ml；当饮酒量上升至1400ml（约相当于3瓶500ml）啤酒或一两半白酒（80ml）时，血液酒精浓度可达到80mg/100ml。这个数据与实际测试结果有一定的出入，其原因在于人体对酒精的吸收、分解能力不同。同样一杯酒，一个人喝了可能一点感觉都没有，而另一个人喝了，则可能烂醉如泥。另外，利用呼气测试仪最精确的结果并不一定完全准确，最精确的检测方式还是要通过抽血化验。这也是交警在认定驾驶员醉酒驾车时必

须进行抽血检测的原因所在。 根据世界卫生组织的报告显示：当驾驶人血液中酒精含量达80mg/100ml，也就是达到醉酒驾驶的临界值时，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的2.5倍。血液中酒精含量达100mg/100ml，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的4.7倍。即使在少量饮酒的状态下，交通事故的危险度也可达到未饮酒状态的2倍左右。

本产品的加工定制是是，品牌是wu，型号是wu，类型是呼吸式酒精检测仪