

肠镜储存柜 双门内镜储存柜 亚克力材质的肠镜储存柜

产品名称	肠镜储存柜 双门内镜储存柜 亚克力材质的肠镜储存柜
公司名称	高港区鑫伟实验设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:鑫伟 型号:xw-194
公司地址	江苏泰州市高港区白马镇陈家村大汪组39号
联系电话	86 0523 86187683 15850877711

产品详情

肠镜储存柜 长90cm 宽45cm 高190cm

二、适用于储存的器械各型号刚性、柔性的胃、肠镜、关节镜、支气管镜、结肠镜、胆镜、喉镜、肾镜等常用内窥镜。三、紫外线的杀菌原理紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的dna（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是uvc紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的dna吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。四、具体操作及步骤首先检查电路是否正确连接，是否因长期使用后设备有漏电现象，发现问题应及时解决，以保障设备安全和人身安全。之后悬挂好已消毒的内窥镜，关上柜门，接通电源，持续通电大约20分钟后关闭电源。此时，柜内处于洁净无菌状态，可以长时间储存内窥镜。五、性能及优点1.操作简单，安装方便，无需培训，即安即用。2.消毒效率高，内镜周转使用率成倍递增，既方便病人又增加了医院的经济效益。3.质量优良，经久耐用，各部件达到塑铝板的实际强度，在使用和运输过程中不易损坏。4.能承受自身配置的紫外光线的长期照射，对操作室的温度、湿度无特殊要求。

紫外线医用消毒柜使用注意事项:1、紫外线灯管请勿直接触摸，消毒时不可直视，不得直接照射皮肤，以免引起损伤；2、使用过程中应保持紫外线灯管的清洁,一般每2周用酒精棉球清洁一次,发现灯管表面有灰尘、油污时，应随时擦拭；3、紫外线消毒时应达到足够剂量，如灯管强度低于70uw/cm²时，应予以更换。或建立使用时间登记卡，使用时间超过1000h，应予以更换；4、对使用中的紫外线应3~6个月用紫外线辐射照度仪做一次强度测试，定期检测紫外线的照射强度，以便达到良好的消毒

名称	规格尺寸长*宽*高 (cm)	可悬挂镜数	
肠镜储存柜	单门	50*45*190	2道
	双门	90*45*190	4道
胃镜储存柜	单门	50*45*180	2道
	双门	90*45*180	4道
气管镜储存柜	单门	50*45*160	2道

	双门	90*45*160	4道
胆道镜储存柜	单门	50*45*160	2道
	双门	90*45*160	4道
宫腔镜储存柜	单门	50*45*160	2道
	双门	90*45*160	4道

本产品的加工定制是是，品牌是鑫伟，型号是xw-194，杀菌设备类型是柜式，适用范围是医用设备，营销是新品，规格是长90cm宽45cm高190c'm