

JR—05软头电子体温计，数字体温计，礼品体温计

产品名称	JR—05软头电子体温计，数字体温计，礼品体温计
公司名称	慈溪市周巷佳绩电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:佳绩 型号:JR—05
公司地址	慈溪市周巷镇城中村傅家路兴一弄19号
联系电话	0086 0574 63320656 13606744322

产品详情

材质	其他	用途	商务礼品
适用场合	商务	适用行业	医药行业
品牌	中性oem	加印logo	可以
适用送礼关系	客户	适用送礼事件	活动庆典
适用性别	不限	包装	精致包装

【技术参数和特点】*测温范围：32 ----42 90-108华氏度*测量温度低于32 时，显示l *测量温度高于42 时，显示h *显示分辨率：0.1 *显示方式：液晶显示（三位半）*功耗：工作状态下为0.15毫瓦*电池：ag3型1.5v普通纽扣电池*蜂鸣提示：测量结束后发出蜂鸣提示声

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器°c符号闪烁，表示处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时°c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则°c符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则10分钟后自动关机

【体温小常识】人体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在36 °c~ 37.3 °c（以口腔温度为准），37.4 °c~ 38 °c为低度发烧，38.1 °c~ 39 °c为中度发烧，39.1 °c~ 41 °c为高度发烧，大于41 °c为超高度发烧人的通常口探温度为36.8 °c，腋探比口探约低0.3 °c~0.5 °c，肛探比口探约高0.3 °c~0.6 °c

本产品的加工定制是是，品牌是佳绩，型号是JR—05，类型是电子体温计，测量范围是32-42（ ），结构型式是直型，示值误差是0.1，外形尺寸是145*24*7（mm）