

婴儿电子体温计 精密型 爱丽斯

产品名称	婴儿电子体温计 精密型 爱丽斯
公司名称	义乌圣盈医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱丽斯 型号:K-006
公司地址	义乌市北苑街道青溪小区106幢2单元301室
联系电话	57985018139 13819967017

产品详情

内装说明书，全英文，具体使用参阅下面的使用说明

本产品具有快速显示读数、“哔、哔”声鸣叫发声提示、精确度高、高低温报警、耗电量省、记忆存储和自动关机的功能；测量温度一般在40秒到1分钟之间。

安全又实用的电子温度计，不再担心孩子使用传统温度计时因玻璃破碎而引起水银中毒等不良后果。而且能在很短的时间内准确测试出体温，为家居必备之用品。专为婴儿设计，探热时间约为1分钟，测量精度达0.1度，带声音提示，记忆功能。可用于口腔量法、腋下量法及直肠量法。

【友情提示】： 温度计使用时，打开电源后，先等20秒左右再测比较准。

型号:k-006

装箱400pcs 尺寸:40*37*72cm 毛重：17.5kg 净重：16.5kg

主要技术参数和特点：*测温范围：32 ----42 *测量温度低于32 时，显示l

*测量温度高于42 时，显示h *显示分辨率：0.1 *显示方式：液晶显示（三位半）*功

耗：工作状态下为0.15毫瓦 *电池：ag3型1.5v普通纽扣电池 *蜂鸣提示：测量结束后发出蜂鸣提示声

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒

2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号

3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器 ° c符号闪烁，表示处于待测状态

4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时 ° c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则 ° c符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量

结果，即可读取显示出的温度值 5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则10分钟后自动关机 人

体温度似身体健康状态的晴雨表，正常的体温一般在36 ° c ~ 37.3 ° c（以口腔温度为准），37.4 ° c ~ 38 °

c为低度发烧，38.1 ° c ~ 39 ° c为中度发烧，39.1 ° c ~ 41 ° c为高度发烧，大于41 ° c为超高度发烧人的通常

口探温度为36.8 ° c，腋探比口探约底0.3 ° c~0.5 ° c，肛探比口探约高0.3 ° c~0.6 ° c

本产品的加工定制是是，品牌是爱丽斯，型号是K-006，测量范围是35-42（ ），精度是-0.2+0.2（f.s）
，距离系数是0（ ），外形尺寸是30（mm）