

加拿大BIOVET猪副嗜血杆菌抗体检测试剂盒 HPS

产品名称	加拿大BIOVET猪副嗜血杆菌抗体检测试剂盒 HPS
公司名称	广州市瑞品生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:加拿大BIOVET
公司地址	广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园19栋202A
联系电话	13265925894

产品详情

广州市瑞品生物技术有限公司

技术咨询，产品购买 林先生 手机号码 13265925894

传真 020-89237038

qq 136155545

加拿大biovet猪副嗜血杆菌检测hps试剂盒

品牌：biovet 型号：trm-521 规格：192 biovet猪副嗜血杆菌抗体检测试剂盒 检测原理：
猪的血清样品和对照经过稀释后加入到包被了hps抗原的微孔板中孵育，同时也加入到包被了cell lysate 的微孔板中孵育。阳性样品中对hps特异反应的抗体会和微孔板中的抗原结合。多次洗板是为了清除未结合的物质，加入酶标记物标记抗体。孵育后，多次洗板清除未结合的酶，最后加入底物发色剂显色。在这步孵育过程中，如果有酶存在，将会有绿色产生，读出其吸光度。通过颜色的鉴定判断样品的结果。阴性对照反应很不明显（很淡的绿色），而阳性对照反应很明显（深绿色）。 材料：

必须的材料但试剂盒内不提供的：1．纯净水 2．可调单多道移液枪 3．吸头 4．elisa洗板机
5．试管（用于样品稀释） 6．酶标仪（带405nm波长的） 7．可以用于稀释其他缓冲液的容器

试剂盒提供的 1．包被hps抗原的96孔微孔板，非包被的微孔板（蓝色）各一块 2．可以直接用的阳性对照

2ml 3．可以直接用的阴性对照

2ml 4．酶标记物

50ul 5．10倍浓缩洗液

2 × 100ml 6．可以直接用的底物发色剂

30ml 7．可以直接用的终止液

30ml 注：终止液

保存在4℃时，可能有晶体产生，这个时候使用不会产生任何效果，请把他放回室温待晶体溶解后使用。