

# FSCF医用口罩

产品名称	FSCF医用口罩
公司名称	上海麦森医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FSCF 型号:99VFE
公司地址	青浦区练塘镇蒸淀朱枫公路6188号1号楼201室
联系电话	86-021-68619111 86-18521379570

## 产品详情

### 日本fscf防病毒口罩产品描述：

日本fscf防病毒口罩通过测试：美国niosh（美国国家劳动安全卫生研究所）n99标准认证合格（99%以上）、美国政府认定机构astm（美国材料试验协会）f2102规格：vfe生物病毒 \*174阻隔效率试验合格，达到99.9%以上。同时对pm2.5：微小颗粒状物质，具有防御功能。为阻隔目前扩散于亚洲国家的微小粒子状物质pm2.5（直径约0.1微米—2.5微米）通过呼吸道进入体内，日本fscf防病毒口罩可作为该问题防御对策制品放心使用。为了使口罩与面部紧密贴合，特别设计出鼻夹内侧及口罩左右两端内侧加入海绵体条形衬垫样式，以达到阻止污染空气入侵的效果。此款防御口罩为四层构造。其中间两层为最高水准，通气良好的静电带电滤片。

日本fscf防病毒口罩由于特殊的4重构造达到令人惊异的捕捉效果（阻隔效率）：日本fscf

**防病毒口罩使用注意事项：** 本口罩虽为可以重复使用产品，但请消费者自我负责根据情况加以使用。

1、口罩在使用中如果出现呼吸困难现象，请终止使用。2、口罩如出现严重污渍现象，禁止洗涤再用。

洗涤后的口罩内部填入的静电带电材料的性能将大大降低。

3、口罩由于使用环境不同，耐久性会出现差异。4、为减轻口罩负荷，应至少配备2只以上本产品。1天使用过后，请置于室内通风良好处阴干1天（24小时以上），仔细抖落后再予以使用，可达到减轻口罩负担、延缓口罩性能降低效果。5、请将口罩从鼻梁上方拉伸至下颚处贴紧佩戴。可根据面部大小调整橡筋，必要时可在耳后系结以增加密合度。6、本品不可用于有害粉尘或产生瓦斯场所。

7、使用中如有不适，请迅速咨询医生。日本fscf防病毒口罩包装规格： 2只/盒

尺寸：175mm\*90mm（长\*宽），挂耳橡筋160mm 防病毒口罩包装参数

重量(kg)	0.5
长(mm)	200
宽(mm)	100

高(mm)

300

以上防病毒口罩尺寸仅供参考，如对此参数有精准需求，请来电确认！

<http://www.mdsin.com/v2/show.php?contentid=65672279>