

# 美式保健拉绳新型黑护腰带

产品名称	美式保健拉绳新型黑护腰带
公司名称	衡水天健医疗器材有限公司
价格	.28/条
规格参数	品牌:鹤舒元 型号:-8型 尺码:S/M/L/XL
公司地址	河北省衡水市安平县新政开发区
联系电话	0318-7688833 15175887926

## 产品详情

产品特性 1、完美贴合身体。符合人体工学设计，舒适透气型面料结合贴合身体曲线的塑料支撑板，提高了支撑固定性和舒适度。 2、超强支撑。动态注塑塑料支撑板，根据人体腰椎凸型设计，调整塑料板可使其紧密贴合腰椎前凸，达到最理想的支撑效果。 3、轻松拉伸，灵活方便。灵活的滑轮收缩系统，低摩擦、光滑易于操作，方便使用者通过拉绳灵活的调节松紧，调节只需一秒。 4、佩戴舒适，效果明显。强有力的固定效果，佩戴产品，您只需轻轻一拉紧固绳，马上就能体会到腰椎前挺，一小时后就能感觉到腰部很轻松，这就是人体工学设计的独特效果。 产品优势

1、该产品拉绳材料为大力马8编工艺。经30000次拉动实验，不会发生断裂，质量绝对可靠。  
2、根据自身需要调整腰带束缚力量大小，远胜于钢板护腰带。 3、本护腰带根据人体工学原理，严格按照医学腰椎曲线的理念设计，是一款专业的腰椎固定装置，真正对腰椎疾病有医学意义的保健矫正效果。  
4、完全贴敷身体。本产品源自于目前欧美应用最广的半硬性腰带，它弥补了传统的硬性腰带不能完全贴敷身体的缺陷，给予腰椎最好的支撑，最适合腰椎术后和腰间盘突出人群来使用。

5、透气。采用优质透气防过敏面料，佩戴舒适，一年四季都适用。适应症 1、腰骶及背部机械性疼痛。 2、腰椎管狭窄。 3、脊椎滑脱。 4、椎间盘突出。 5、面关节症候群。

也可以用于如下术后的固定：椎板切开术、椎间孔切开术、腹腔镜前路融合、后外侧融合、减压术等。

使用说明及穿戴步骤 1、分离左右两侧腰带，将后面支撑板与腰椎居中放置。

2、将左侧护腰带绕至胸前，将右侧护腰带也绕至胸前与左侧护腰带粘合固定。

3、用左右手拇指套在手拉环上向前拉动绳子。

4、将绳子调整到合适的力度时，将手拉环固定在魔术贴上。