

# Smiths史密斯pvc输液袋

产品名称	Smiths史密斯pvc输液袋
公司名称	上海麦森医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Smiths/史密斯 型号:MX4705
公司地址	青浦区练塘镇蒸淀朱枫公路6188号1号楼201室
联系电话	86-021-68619111 86-18521379570

## 产品详情

mdsin品质提供的clear-cuff输血输液加压袋 带简易压力计；规格：500ml；产品特点：

透明：易于观察输液袋及袋内液体水平 持久耐用：采用一定厚度的聚氨基甲酸乙酯

清洁：保持清洁的病人监护环境 节约：可全面清洁而不必丢弃

方便：特殊的挂钩使更换输液袋时不必从输液架取下clear-cuff 持续液体流动：便于有效的液体管理

快速简易：大型号充气球囊可以更快更方便的进行充气；hi-flotm三通可迅速放气，不必挤压气囊

mdsin希望以品质产品及服务与中国客户共赢.健康生活,美好未来！ clear-

cuff输血输液加压袋(简易型)500ml包装参数

重量(kg)	1
长(mm)	250
宽(mm)	150
高(mm)	100

clear-cuff输血输液加压袋(简易型)500ml产品faq

q:输血输液加压袋的收费标准如何？  
a:在临床上，输血输液加压袋是作为有创血压传感器的配套设备使用的，具有可重复使用

，价值较低的特点，所以在医院一般是不收费的。q:临床应用有哪些？a:广泛适用于急诊科、手术室等临床各科室的紧急输血、输液及各种有创动脉压监测。q:请问250ml的输液袋，是否可以使用500ml的输血输液加压袋？

a:不匹配，直接影响加压效果。q:请问这个输血输液加压带显示的150、300两个压力值的单位是什么？a:单位均是mmhg。q:请问这款产品如何使用？a:1将穿刺过的储液袋悬挂在clear cuff®加压袋。2旋转三通旋塞手柄，使“off”指向侧孔，进行充压。3给

球囊充气至绿带外观指示的适当尺寸。一旦达到需要的压力，将“off”手柄指向clear cuff加压袋。  
4 旋转“off”手柄至充压球囊来减压。  
q:请问日常使用中应该如何清洁？  
a:clear cuff加压袋可以用10%漂白剂或70%异丙醇进行清洗。请不要弄湿本品或浸没在水中。

以上clear-cuff输血输液加压袋(简易型)500ml尺寸仅供参考，如对此参数有精准需求，请来电确认！