

## 2014深圳现货批发、测酒气体检测仪、高精度酒精测试仪AT-818

产品名称	2014深圳现货批发、测酒气体检测仪、高精度酒精测试仪AT-818
公司名称	深圳市福田区恒之源电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:OEM 型号:AT-818
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙尾社区沙尾西村188号201
联系电话	86 0755 61362161

### 产品详情

使用说明：按屏幕正面长按1-3秒“power”开机键进入约10秒的传感器预热倒计时过程。

当看到屏幕出现blow字样开始吹气(向吹气孔连续吹气约3-6秒钟左右进入约5秒的反应期同时测试结果会显示在lcd上，约5秒钟后自动关机。

将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-6秒呼气到感应器内。

显示屏可读取测试结果。

当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05%bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l)

当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l)

《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

报警声音说明:当测试结果比预设的报警点低,其差值大于0.2%bac时,数字显示测试结果,无报警声.当测试结果比预设的报警点低,其差值小于或等于0.2%bac时,数字显示测试结果,有预报警声.(只有当报警点大于0.20%bac心上时才有此项功能.)

维护与保养请勿使用苯、稀释剂或汽油等溶剂清洁本产品，以免损坏机体外壳。防止跌落和强震，否则会导致本机故障。除更换电池外，请勿尝试修理、改造或拆卸零件。如果长时间不使用本产品时，请取出电池，以免因电池漏液而损坏本机。

本产品设计、制造、检验遵守以下国家标准：gb/t21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》gb19522-2004《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》

特点：先进的纳米半导体酒精传感器； 响应、恢复迅速、检测快捷方便；  
smd装配工艺，性能稳定可靠； 人工智能微电脑控制； 测试过程屏幕直观显示；  
蓝色背光照明的lcd数码、字图显示； 便携设计、小巧轻便； 酒精超限自动声报警；  
传感器故障自检； 智能节电设计，电池欠压指示

产品使用1 打开本机后壳的电池盖，将3节aaa、1.5v的电池按极性装入本机，然后再装上电池盖，即可投入使。2 按下“开机”键，伴随一短促蜂鸣声，背光点亮，同时屏幕显示从100到000的倒计时，屏幕下部显示“wait”字样,提示机器运行预热程序，此时请不要吹气，否则会影响测试精度。预热完毕，“wait”显示消失，探测器发出一声蜂鸣，同时显示“blow”字样，“c”字母游动显示，此时即可开始下一步的呼出气体酒精含量测试。

说明：预热过程中，倒计时速度与上次测试浓度有关，浓度越低，倒计时越快，否则越慢。

3 被测试者深吸气，当屏幕上“c”字母游动显示时对准本机吹嘴连续均匀吹气，直到本机发出一声蜂鸣，停止吹气。

4 吹气结束，屏幕游动显示“ ”符号，同时显示“test”字样，提示正在分析测试结果，此时不要吹气，否则会影响测试结果。分析结束后屏幕上所显示的浓度值即为测试者呼出气体中的酒精含量，该值保持数秒之后，本机自动关机。

5 若要进行下一次测试，须重新按“开机”键，过程参照上述2~4。

## 使用说明

1、按动开关键一次，测试仪的lcd显示屏便会亮灯，同时会发出“唝”的一声。2、数字亦会由10跳到0，便完成预热程序。3、将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-5秒呼气到感应器内。4、显示屏可读取测试结果。5、当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to0.08% bac(or 0.8g/l)6、当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over  $\geq$  0.05% bac (or 0.5g/l) over  $\geq$  0.08% bac (or0.8g/l)7、《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

-----[温馨提示]·喝酒后，建议先稍待20分钟再检测，因为酒精需要约20分钟的时间从消化器官进入血液内，而残留在口腔的酒精也需要时间消散。·要得到更准确的结果，每次测试之间应距离最少三分钟时间。·请勿使用含苯，汽油及天拿水成份的产品清洁测试仪。·请勿让任何液体渗进感应器内。·梦王汽车用品专营店提醒您，为了您和他人的安全，请勿酒后驾车。

本产品的加工定制是否，品牌是OEM，型号是AT-818，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.00-0.20BAC%，测量精度是正负0.0120BAC%，分辨率是0.01，电压是4.5（v），尺寸是165\*118\*45（mm），重量是0.188（kg），电源是3\*AAA电池