

# 家用鱼跃牌浮标式氧气吸入器XY--98BIII

产品名称	家用鱼跃牌浮标式氧气吸入器XY--98BIII
公司名称	济南树隆商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鱼跃 型号:XY--98BIII
公司地址	山东济南市市中区西红庙
联系电话	86 0531 87561599 18660179356

## 产品详情

产品名称：

xy-98b 氧气吸入器产品类别：  
氧气吸入器系列

器

产品简介

产品名称：医用氧气吸入器  
输入压力：< 15mpa 输出压力：0.25mpa  
流量调节范围：1-10l / min  
安全阀：0.36mpa自动排气  
进口螺纹：g5 / 8 ' ' 出口螺纹：m12x1  
附有潮化瓶装置 氧气吸入器（浮标式）  
主要配套于医用中心供氧系统，供医疗单位急救给氧和缺氧病人作氧气吸入用、科研机构、工矿等吸入流量控制的装置。氧气吸入器流量精确，使用方便、安全。是医院急诊室、病房病人给氧治疗的必备器械。氧气吸入器是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力，以供使用的气瓶减压装置，主要用于焊接、切割及化工、医药卫生、电子工业等方面。氧气吸入器不论输入压力和输出

流量发生变化，都能保证稳定的输出压力。氧气吸入器是一种自动降低管路工作压力的专门装置，氧气吸入器是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，氧气吸入器的特点是在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力值在一定的范围内。

#### 减压器的安全使用

使用减压器应按下述规则执行：（1）气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。（2）减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。（3）减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。（4）减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。（5）减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。（6）减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。（7）各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。

医用减压器专为减轻使用者痛苦而设计，产品具有输出准确、稳定、优质的品质和安全的性能，会让你在使用过程中更安全、更放心、更称心。

结构特点：

- 1、母体采用优质黄铜制造。
- 2、上盖采用高强度锌合金制造，表面镀铬。
- 3、进气管带烧结青铜过滤网。
- 4、设有外置式安全阀。

本产品的加工定制是否，品牌是鱼跃，型号是XY--98BIII，测量范围是0~25（MPa），额定出口压力是0.2~0.3（MPa），用途是氧气减压器，结构是单级式，工作原理是正作用式，环境温度是30（ ），装箱数是10