

哺乳动物怀孕检测仪 母猪怀孕测孕仪猪用 A超 B超

产品名称	哺乳动物怀孕检测仪 母猪怀孕测孕仪猪用 A超 B超
公司名称	郑州宝格丽机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式超声检测仪 品牌:宝格丽
公司地址	郑州高新技术产业开发区科学大道89号4幢A单元9层69号
联系电话	13700847180

产品详情

为了获得精确的测试结果，最早可在母猪配种18天进行测试，最晚不能超过母猪配种后75天。在配种后18天进行测试应该在30天后再重复一次以保证精确的测试结果。

使用方法：1.开始测试母猪以前，准备好一种帮助接触的油，像石蜡油、菜油、或机油。2.把油抹在怀孕探测仪的探头表面或喷洒在母猪上，这样会使仪器和母猪有一个比较好的皮肤接触。3.将探头贴置于母猪右侧距离后退2英寸位置。（大约在倒数第二与第三乳头之间）呈45度角进行测试。4.每当探头离开测点，均须重新抹油再继续测试。5.间断音调=“空怀母猪”持续音调=“怀孕母猪”。6.最好选择在母猪安静情况下测试，将使测试工作更加顺利。初次测试时为无孕时，请隔些时日（7-10天），再复测以进行确定。工作原理：测孕仪的主机能发出一种高频率音波，称之为超音波，当这种超音波进入母猪体内进行扫描时，随即有回音反射到接收器。测孕仪便能分辨所接收到的回音，是否来自羊水的反应，而以连续长音表示子宫充满羊水即为有孕，继续短音代表无孕。好的测试结果将需要15 - 30秒钟的时间，当你对测试程序熟悉以后，5秒钟的时间就可以得到好的结果。测试开始应在母猪的右边进行，在探头的表面或母猪的身上抹上一定数量的油，把探头放在图上所指的母猪部位，最好的测试位置是位于母猪乳头线一英寸以上和母猪后腿前两英寸之间的位置，把超声波对准母猪的身体以扫描子宫，这个角度大约是45°。c 向前面，45°。c 向侧面，（对准左前腿上面的一个地方），在这个位置上再调整怀孕探测仪的角度以扫描整个子宫，你将会听到一个回断的音调，这意味着良好的皮肤接触，如果母猪怀孕，这个音调是持续的，记录下测试的结果，然后开始测试下一头母猪，请记住每测试一头母猪前必须抹上油，如果一头母猪在右边测试的结果是空怀的话，请在左边重复同样的测试程序以保证测试的准确性。

本产品的加工定制是是，类型是手持式超声检测仪，品牌是宝格丽，型号是Z1067，测量范围是30mm----60mm，工作温度是常温（ ），尺寸是常规（mm），重量是0.2（kg），适用范围是猪羊狗猫