

非接触式红外线耳温枪，耳温计，测温仪，电子体温计

产品名称	非接触式红外线耳温枪，耳温计，测温仪，电子体温计
公司名称	东莞市樟木头星翰电子厂
价格	面议
规格参数	品牌：XINGHAN:型号：HIT8008 类型：手持式:适用对象：人体测温仪 测量范围：-32~40:测量精度：0.3
公司地址	广东省·东莞市
联系电话	86-076982932582 18938214688

产品详情

产品特点：

- 1.测量范围:32.0 ~ 43.0
- 2.测量精度:± 0.3
- 3.反应时间：0.5秒
- 4.可设置温度报警值
- 5.采用红外线非接触式
- 6.可选择人体温度和表面温度测量
- 7.带背光的液晶显示屏
- 8.电规格：9v电池
- 9.自动关机:无操作约7秒自动关机

产品描述:

該產品是一款專業測量人體溫度的非接觸式紅外線體溫計，根據人體皮膚的差異和所要測試的人體部位的不同,所測量的溫度會有所不同,這是很正常的,原因是越是裸露在外的人體部位就越是受環境溫度的影響越大。當室內外溫變化很大時，應該把人體紅外線測溫儀置於室內15至20分鐘後再使用。

安全手則：

- 1,請在使用前仔細閱讀本說明書。
- 2,本產品使用環境溫度是 10 到40 ,最佳溫度25°。
- 3,請不要把本產品置於高於40 或低於0 的環境中使用。
- 4,請不要把該產品靠近帶電的物體，以免電擊。
- 5,請不要在相對濕度大於80%的環境下使用該產品。
- 6,請不要將本產品太靠近電磁範圍（如無線電，手機等）。
- 7,請不要將本產品在太陽下暴曬或靠近火爐，更不能接觸到水。
- 8,請不要撞擊或掉落本產品，若有損壞請不要使用。
- 9,額頭上的頭髮，有汗，帽子或圍巾會影響測量數據準確度。
- 10,請確認測量距離不要大於5cm內。

爲了得到準確爾穩定可靠的測量數據，當室溫變化很大的時候，應把本測溫儀置於室內15-20分鐘后使用。額頭出汗或其它原因造成額頭溫度不能正常反應體溫時，請從耳垂后測量。需要清潔時，請用酒精輕拭儀表表面。一旦產品出現問題，請聯系分銷商，不要試圖自行修理。

其它使用說明

非接觸式紅外線體溫計是一款專業設計測量人體溫度的體溫計，它廣泛被用於家庭使用。產品設計符合astm 1965-1998標準，符合醫療指令93/42/eec.本產品不能取代醫生的診斷。

使用前的注意事項

為了得到穩定而可靠的測量數據，當溫室變化很大時，應該把人體紅外線測溫儀置於室內15-20分鐘後再使用。

本产品的品牌：XINGHAN是型号：HIT8008，类型：手持式是适用对象：人体测温仪，测量范围：-32~40是测量精度：0.3，分辨率：0.1是加工定制：是