

GP ZA13 助听器电池

产品名称	GP ZA13 助听器电池
公司名称	深圳赛格电子市场美兰电子零件商柜
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:GP/超霸 型号:GPZA13
公司地址	深圳市深南中路赛格大楼一层D04号
联系电话	86 0755 86367246 13510538829

产品详情

zinc air

material safety data sheet

gp model	voltage (v)	nominal capacity (mah)	dimension		colour code	cross reference				
			dia (mm)	ht (mm)		iec	jis	everead y	varta	duracell
gpza10	1.4	90	5.8	3.6	yellow	pr536	pr536	ac10	-	da230
gpza13	1.4	290	7.9	5.4	orange	pr48	pr48	ac13	v13a	da13
gpza312	1.4	160	7.9	3.6	brown	pr41	pr41	ac312	v312a	da312
gpza675	1.4	630	11.6	5.4	blue	pr44	pr44	ac675	v675hp a	da675

温馨提示:需要其他型号纽扣电池请联系掌柜 纽扣电池一应俱全

sony.maxell.gp.sanyo.劲量.金霸王等系列电池均从香港进口,保证质量,绝对超值

品名: gp锌空气电池za13助听器电池(图片为实物拍摄。由于相机像素低,拍得不是很清楚)

包装: 独立转盘装 每盘6颗

【专家观点】

数字助听器的性能与电池的使用有密切关系。要充分发挥助听器的性能,使用高质量的电池十分必要。电池质量不但会影响助听器的使用时间,还会影响助听器性能的稳定性。

助听器专用电池均为锌空电池，这种电池以空气中的氧气为正极材料，而不必在电池内加入，因此就有空间存储更多的负极材料。因此，它的容量比其它电池高出3 - 10倍，是所有实用电池体系中最高的。

另外，锌空气电池还具有工作电压很平稳，杂音很小等优点，是助听器的最佳电源。

【使用说明】

电池的使用时间取决于助听器的类型和使用环境。大功率的助听器功耗也较大，即使是同样类型的助听器，功耗也会因助听器的设置和使用环境不同而有所区别。

助听器电池为锌空电池，需要与空气接触才能工作。在正式使用之前，不应让电池接触到空气。电池上贴有粘性封贴，确保在使用前电池保持密封。

请注意电池包装上的日期，了解电池的有效时间。新电池刚开始使用时，可能需要等几秒钟再装入助听器，以便让电池充分发挥作用。因为电池只有与空气充分接触后才会被激活。

当电池电力不足时，打开电池舱盖，取出电池，揭下新电池的封贴，将电池上标有“+”符号的一面（正极）向上装入电池舱后，小心合上电池舱。

不要将已耗尽电力的电池留在助听器内，因已耗尽的电池可能会漏液而损伤助听器。因此长时间不佩戴助听器（如一周左右）时，应将电池取出。

一粒电池一般可以用多长时间？ 电池实际使用时间与助听器型号、增益、听力损失程度、气候乃至使用时调节的音量等因素有关，差别非常大。一般来说，助听器所用电池越大，听力损失程度越轻，使用的时间就越长。从我们了解的实际使用情况看，以下时间可供参考：

一般使用6-50天，大多数用20-30天；

本产品的加工定制是是，品牌是GP/超霸，型号是GPZA13，标准电压是1.4V