

# 新生儿脐带消毒护理器 脐尔宝

产品名称	新生儿脐带消毒护理器 脐尔宝
公司名称	山东九尔医药生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东九尔 型号:20ml*2
公司地址	山东省济宁市神道路7号
联系电话	0537-2108833 13963708833

## 产品详情

山东九尔医药生物科技有限公司始创于2008年，系九尔实业集团；公司不断引进国际一流的先进技术和设备，专业从事医用消毒超声耦合剂、新生儿脐带消毒护理器、医用阴道冲洗器、阴道填塞、冷疗凝胶、医用皮肤保护剂、一次性使用导管固定器、医用高分子夹板、绷带、医用皮肤注射消毒器等产品的研发、生产及销售。是一家以医疗器械、消毒产品、口腔科、超声科、骨科创伤外固定材料、生物基因工程技术的研究、开发、生产、销售为一体的高科技台湾合资大型企业。

### 脐尔宝 新生儿脐带护理

双重护理（a瓶清洁脐带+b瓶消毒脐带）

德国basf进口原料，水溶性好，稳定性强。

广谱杀菌剂，能杀灭细菌、病毒、真菌盒一些芽孢

广泛应用于皮肤，粘膜及伤口的消毒，不易引起过敏反应。

慢性释放功能，能缓解地释放出活性碘，杀菌作用持久。

成膜作用，能在粘膜及破损皮肤表面形成保护膜，保护损伤部位。

含护肤成份保护滋润婴儿娇嫩的皮肤，对婴儿的皮肤无任何刺激。

注册号：鲁宁食药监械（准）字2012第1640009号

规格：15ml\*2 20ml\*2

使用方法: 新生儿脐带的护理:(b.sf-i型)：

(1)当脐带尚未或部分脱落时，为了避免厌氧菌感染，先用脐尔宝a瓶（过氧化氢），中的溶液喷涂，再用医用棉签由脐部中心向外周部轻轻涂擦，自内向外成螺形消毒，直径约3厘米左右，同时注意脐轮下缘凹陷部分消毒，脐带断端产生泡沫后拭干，然后再用脐尔宝b瓶(聚维酮碘)中的溶液喷涂，2次/天。

(2)当脐带完全脱落后，断端尚未完全愈合，局部常较湿润，并有少量渗出物或脐带根部和周围皮肤略有红肿也要按上述处理步骤去做，2-3次/日；但若脐带周围红肿明显，并且脐轮有浓汁并带有臭味，同时婴儿还有发热、不愿吃奶、总是哭闹等表现，应及时去医院治疗。

(3)新生儿沐浴后脐部消毒：擦干脐部后，用脐尔宝b瓶中的医用消毒液擦拭即可。婴儿皮肤先用脐尔宝a瓶中的溶液喷涂脐部，清洁其渗出物或脓性分泌物。

然后再用脐尔宝b瓶中的溶液消毒护理脐带，每日2次。