

CPR690 心肺复苏模拟人,人工呼吸假人

产品名称	CPR690 心肺复苏模拟人,人工呼吸假人
公司名称	上海杰宣科教设备有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:杰宣 型号:JX/CPR690
公司地址	上海市松江区文诚路500弄6号
联系电话	021-33558956 18117577580

产品详情

该产品在原jx/cpr680的基础上，功能进行全面升级，采用全液晶屏显示。突出cpr训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。更加符合临床和教学练习cpr操作要求。

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准

功能特点：

采用8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计、cpr操作动画显示，使用说明中文文字显示。

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

- 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

- 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
- 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
- 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行cpr训练、模式考核和实战考核。

- 方式一：cpr训练，可进行按压和吹气训练。
- 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。
- 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

控制器显示屏功能：

电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

- 吹气量过少时，条形码为黄色。
- 吹气量合适时，条形码为绿色。
- 吹气量过大时，条形码为红色。
- 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

- 按压深度过少时，条形码为黄色。
- 按压深度合适时，条形码为绿色。
- 按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：2010标准为至少100次/分，也可自行设定数值。

电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压后输出电源12v。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

打印机功能：

操作结束后打印操作过程。

成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

材料特点：

面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注塑而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级显示控制器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

2010国际最新操作指南光盘1盘；

现场急救常用技术使用手册 1 本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；

友情提示：

欢迎您来电咨询!!

我们可以帮您推荐符合您要求的cpr690 心肺复苏模拟人相关产品！