

CPR500 心肺复苏模拟人

产品名称	CPR500 心肺复苏模拟人
公司名称	上海杰宣科教设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:杰宣 型号:JX/CPR500
公司地址	上海市松江区文诚路500弄6号
联系电话	021-33558956 18117577580

产品详情

该产品采用美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准，经国内权威专家建议指导下，集国外同类产品之长处及公司科技人员的共同努力，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统、电力系统单位、工矿企业、交通部门单位等各种需要现场救生技术的单位部门进行急救培训使用的高档型最新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)新指南标准 功能特点：

大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。 模拟标准气道开放。

人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：

• 按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 • 按压强度正确（5~6cm区域）、错误（小于5cm大于正确区域）的显示分别由条形(黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-过大)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。

人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：

- 吹入的潮气量 500ml/600ml-1000ml 的显示由条形(黄灯-过少、绿灯-适时、红灯-

过大)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。

- 每吹气一次或胸外按压一次，心跳多会在液晶屏上显示一次心电图，操作成功后，电脑显示器上的液晶屏上会显示正常动态的心电图； 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：先有效胸外按压30次再有效2次人工吹气既30：2五个循环周期cpr操作；

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。 材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置： 全身标准模拟人一具；

微电脑显示控制器一台； 微电脑显示控制器与人体模型 连接线一条；

220v外接电源线一条； 高级铝塑硬皮箱一只； 肺气袋四个； 可换脸皮一张；

一次性cpr屏障消毒面膜1盒（50张）； 打印纸二卷； 产品保修卡一份；

产品合格证一份； 复苏操作垫一条；

友情提示：

欢迎您来电咨询!!

我们可以帮您推荐符合您要求的cpr500 大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人相关产品！