

# CPR100 简易型半身心肺复苏模拟人

产品名称	CPR100 简易型半身心肺复苏模拟人
公司名称	上海杰宣科教设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:杰宣 型号:JX/CPR100
公司地址	上海市松江区文诚路500弄6号
联系电话	021-33558956 18117577580

## 产品详情

公司咨询电话：021-33558956

公司咨询手机：18117577580

公司联系qq：21688988

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准 模拟气道开放  
人工口对口呼吸（吹气）人工胸外按压 操作周期：30次按压再2次人工吹气共30:2五个循环cpr操作  
操作频率：至少100次/分 操作方式：训练 组成部分:头部、躯干、肺袋 清洁指南:

- 模拟人的面皮与胸皮是由同种材料制造，可用同种清洁方式清洗。
- 如果物品变脏，请用肥皂水清洗；如果非常脏可用一些家庭常用的清洁剂或洗涤剂清洗，如：油葫芦，洗洁精等。建议使用清洁剂时注意选用磨损性最低的产品以保证皮肤的使用寿命。
- 面皮可用稀酒精擦拭已达到消毒作用（切忌使用带腐蚀性的液体进行浸泡）。在做教学用途时可用稀酒精擦拭消毒作额外安全措施。
- 勿忘用同样的方法擦拭消毒上胸泡沫部分保持模拟人内部清洁。

安装: 1. 轻勾一下模拟人肩部的卡扣向上拉起打开胸部。 2.

连接头部：将头部分的脖子放置在躯干部分脖子的两个主轴上。 3.

折叠肺袋，使肺袋可以穿过口中进入胸部。 4. 抬起模拟人下巴，使头部呈仰起状； 5.

从口中将折起的肺袋插入； 6. 继续将肺袋往口中推，直到其从脖子处出来； 7. 将伸出的一头轻轻拉出；

8. 将肺袋置于按压处之上（即躯干泡沫部分的中心那块塑料上）使肺袋上的椭圆与躯干上的塑料位置吻合；9. 请确认肺袋已经摊平没有曲折；10.将面膜扣于头部两侧的扣子上；11.此时可将躯干关闭，将肩部两个卡扣扣住。

友情提示：

欢迎您来电咨询!!

我们可以帮您推荐符合您要求的cpr100 简易型半身心肺复苏模拟人相关产品！