

不锈钢两柱牵引床 不锈钢龙门架骨科牵引床

产品名称	不锈钢两柱牵引床 不锈钢龙门架骨科牵引床
公司名称	浙江曙光医疗器械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江曙光医疗 型号:曙光QYC-201A
公司地址	浙江海宁市长安镇（农发区）新兴路29号
联系电话	15824328565

产品详情

不锈钢两柱牵引床 不锈钢龙门架骨科牵引床

曙光qyc-201a两柱型多功能骨科牵引床主要由床面板、床架、床头尾靠背、护栏、牵引架以及传动系统等组成；床面材料为高强度工程塑料板、高档实木板或钢板；床架和床脚采用冷轧钢板、钢管，或不锈钢制造，美观耐用。骨科牵引床采用手摇把转动丝杆传动实现病床姿态的调整，安全可靠。

本产品适用于医院骨科病房等使用环境。安装与使用方法 曙光qyc-201a两柱型多功能骨科牵引床在使用前应先检查其外观是否光滑、部件是否完整，各部件的安装、配合等是否有效。使用时应按产品的使用要求掌握适宜的力度。

- 1、骨科牵引床床身与床架装配后，应固定牢靠，不得有松动、滑动的现象；
- 2、使用前应检查各紧固部件是否松动，如有松动应适当紧固；
- 3、操作转动手柄按顺时针升，逆时针降的原理进行，使背框、脚框等上升或下降；手柄使用完后应折回隐藏位，以免碰伤。
- 4、骨科牵引床在调整床面角度时，应避免有除病人以外的人坐在床上，以使床在合理的负载范围内工作。
- 5、床头牵引架上配有拉手环，床尾牵引架配有滑轮，可根据需要调节、使用。
- 6、在选择和使用韩式护栏时，用手握住护栏的尾部，然后向床尾方向拉，护栏就会架起；按住锁扣，用手握住护栏的尾部，推向床头方向，护栏就会收下。